

GEEMARC  
**CLEAR SOUND**<sup>®</sup>  
HEAR THE DIFFERENCE

Français

**AMPLIDECT 280/285**<sup>™</sup>

**geemarc**<sup>™</sup>  
Telecom SA



AMPLIDECT285<sup>™</sup>



## Raccordement électrique :

L'appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée « dangereuse » selon les critères de la norme En60950). Par précaution en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

## Raccordement téléphonique :

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Télécommunication) au sens de la norme En60950.

ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée Bp20061  
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX

Pour tout renseignement technique ou toute commande visitez notre site web

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

TEL. SERVICE APRES-VENTE : 03 28 58 75 99

## Sommaire

Recommandation	1	Fonctions de base	16
Félicitation	1	Appeler	16
Consigne de sécurité	2	Recevoir un appel	17
Présentation	3	Fonction secret	18
Description des touches	4	Fonction amplification	18
Présentation des touches	7	Sonnerie	19
Description des symboles	10	Rappel du dernier numéro	20
Raccordements	11	Liste d'appel	22
Installation du bloc des batteries	12	Verrouillage	24
Mise en service du combiné	12	Torche	24
Utilisation du clip ceinture	13	Réponse automatique	25
Utilisation de l'écouteur	13	Sélection du langage	25
Montage mural	14	Attribution d'un nom	26
Mise en service ou hors service du combiné	15	Réveil	26
		Recherche combiné	27
		Mode de numérotation	27
		Mains libres	28
		Signal d'appel	28

# Sommaire

<b>Fonctions avancées</b>	<b>29</b>	<b>Fonctionnalités</b>	<b>55</b>
<b>Menu Principal</b>	<b>29</b>	<b>Problème divers et solutions</b>	<b>57</b>
<b>Menu Détaillé</b>	<b>30</b>	<b>Solutions aux problèmes du répondeur</b>	<b>58</b>
<b>Répertoire</b>	<b>31</b>	<b>Spécifications techniques</b>	<b>59</b>
<b>Mémoires directes</b>	<b>34</b>		
<b>Réglage BS</b>	<b>35</b>		
<b>Réglage Combiné</b>	<b>37</b>		
<b>Enregistrement d'un combiné</b>	<b>41</b>		
<b>Fonctionnement en multi-combiné</b>	<b>42</b>		
<b>Fonction double appel</b>	<b>44</b>		
<b>Fonction du répondeur</b> <small>(disponible uniquement pour AMPLIDECT285™)</small>	<b>45</b>		
<b>Annonce</b>	<b>45</b>		
<b>Message</b>	<b>48</b>		
<b>Réglage du répondeur</b>	<b>50</b>		
<b>Ecoutez votre messagerie à distance</b>	<b>54</b>		

## ■ Informations générales

### Garantie :

Cet appareil est garanti 2 ans pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre, l'intrusion d'un liquide ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel, rapprochez-vous de votre point de vente.

### Recommandations pour la recyclage :

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.


Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous :

- Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou apportez votre ancien appareil au magasin où vous achèterez le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

## ⚠ Si vous avez souscrit à un abonnement ADSL

Merci de contacter votre fournisseur ADSL afin de brancher un filtre bruit (entre la ligne de téléphone et la base de votre téléphone) si vous avez des grésillements lorsque vous êtes en conversation ou si la fonction présentation du numéro que vous avez souscrit ne fonctionne pas.

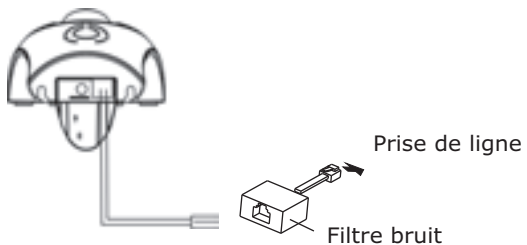

## Recommandation

### Félicitation

Pour l'achat de notre produit de haute qualité.

Pour une utilisation complète de votre téléphone, merci de lire attentivement ce manuel afin de connaître toutes ses caractéristiques et son fonctionnement.

## Consigne de sécurité

Afin d'éviter tout accident électrique et corporel, merci de suivre ces précautions basiques de sécurité avant d'utiliser le téléphone.

1. Lisez et observez attentivement le manuel d'instruction.
2. Pour nettoyer votre téléphone, débranchez-le, puis utilisez un chiffon mouillé pour l'essuyer.
3. Ne placez pas d'objet sur le cordon de la ligne car cela pourrait l'endommager.
4. Ne pas utiliser le téléphone dans des endroits humides où il y a un risque d'explosion
5. Evitez de renverser tout liquide sur le téléphone.
6. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter le service technique au 03 28 58 75 99.
7. Faites attention à la polarité des piles. Insérez les piles rechargeables en accordant les symboles polaires.(description p.11)
8. Utilisez uniquement les piles indiquées dans le guide d'utilisation. N'utilisez jamais d'autres piles ordinaires ou des piles alcalines conventionnelles car celles-ci pourraient endommager l'appareil.
9. Ne mélangez pas des piles épuisées avec des piles neuves. Ne jetez pas les piles épuisées avec vos ordures ménagères ou dans un feu.
10. Si vous êtes sûr de ne pas utiliser le combiné téléphonique pendant un mois, enlevez les piles du compartiment.
11. Utilisez seulement le bloc d'alimentation indiqué dans le guide d'utilisateur.
12. Gardez le téléphone loin de la portée des enfants.

## Spécifications techniques

Bande de fréquence	1.88~1.90GHz
Canaux	120 canaux duplex
Puissance porteuse	<250mW
Modulation	GFSK
Stabilité de fréquence	< + 50 KHz
Durée de charge	15 heures
Température d'utilisation	Normal: de 15°C à 35°C, Maximale: de 0°C à 40°C
Humidité	0% à 90%
Poids (grammes)	Base: 197; Combiné: 117.4
Dimensions (mm)	Base: 124.4 x 114 x 78; Combiné: 133 x 46 x 19.5
Alimentation	Base: par transformateur 7.5V, 500mA; Combiné: batteries Ni-MH 1.2V x 3, 600mA

## Solutions aux problèmes du répondeur

(disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)

**Vous n'arrivez pas à entendre les messages, les bips sonores, etc.**

- Ajustez le volume de l'annonce.

**Le répondeur est toujours sur l'annonce 2.**

- La boîte de réception est pleine. Effacez des messages

**Les messages sont incomplets.**

- La boîte de réception est pleine. Effacer des messages.

## ■ Présentation

Une fois le colis déballé, vérifiez que vous disposez de l'ensemble des éléments ci-dessous. Si l'un des éléments est absent, merci d'appeler directement le revendeur.



Base



Combiné



Guide d'utilisateur



Piles  
(3 AAA Ni-MH)



Adaptateur\*



Clip ceinture




Cordon de ligne\*

\*L'adaptateur peut être absent d'un pays à l'autre.

## Description des touches

### Combiné

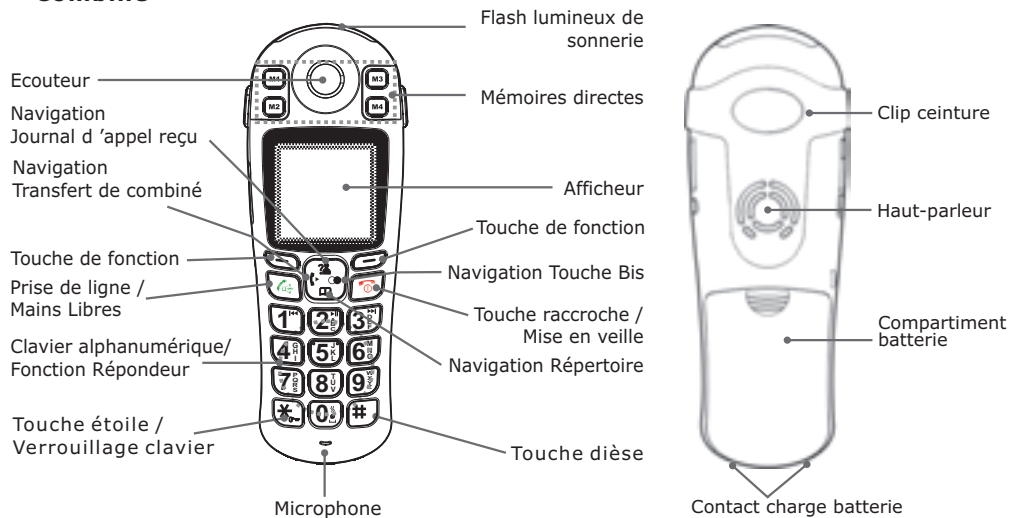

## Problèmes divers et solution

Symptôme	Solution
Le combiné ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'adaptateur soit correctement connecté.</li> <li>• Vérifiez que la ligne du téléphone soit correctement connectée.</li> <li>• Vérifiez que les batteries du combiné soient correctement connectées.</li> <li>• Vérifiez que les batteries du combiné soient correctement installées.</li> </ul>
Absence de tonalité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la ligne téléphonique soit correctement connectée</li> <li>• Vérifiez que l'adaptateur soit correctement connecté.</li> </ul>
Rien n'apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les batteries soient correctement installées.</li> <li>• Vérifiez que les batteries soient correctement rechargées.</li> <li>• Vérifiez que le combiné soit allumé.</li> </ul>
Les batteries sont faibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les points de contact de batteries soient propres.</li> <li>• Changer les batteries.</li> <li>• Vérifier que vous avez utilisé les batteries 3 AAA Ni-MH.</li> </ul>
Aucun numéro s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous d'avoir souscrit au service « Présentation du numéro ».</li> <li>• Votre correspondant appelle en numéro caché.</li> <li>• Laissez sonner le téléphone, le temps que celui-ci synchronise les informations.</li> </ul>

## Fonctionnalités (suite)


### Note:

- La présentation du numéro est possible uniquement si vous avez souscrit à un abonnement « présentation du numéro » à votre compagnie de téléphone.

### Fonctions du répondeur (disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)

- **Système de réponse numérique**
- **Enregistrement personnel de votre répondeur/Instructions vocales**
- **Enregistrement de 15 minutes de messages**
- **Contrôle du volume (5 niveaux)**
- **Economiseur d'écran**
- **Choix du langage**
- **Ecoutez votre messagerie à distance**
- **Répondeur on/off**
- **Symbole appel manqué**
- **Date et heure**

## Description des touches (suite)

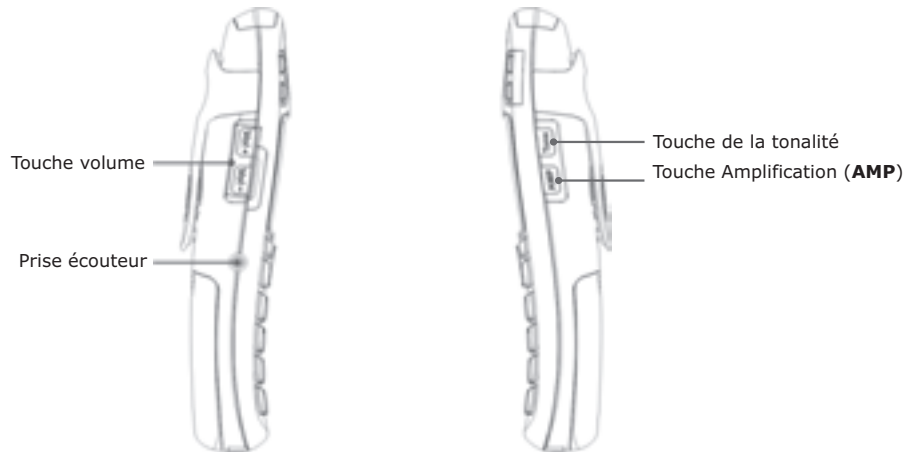


**AMP** : permet de rajouter 15dB supplémentaire au niveau de la réception  
**Vol +/-** : permet d'ajuster le niveau de volume de réception en mode écouteur ou mains libres

**Tone** : permet de changer la tonalité (grave, normal, aigu)

## Description des touches (suite)


Base : AMPLIDECT285™

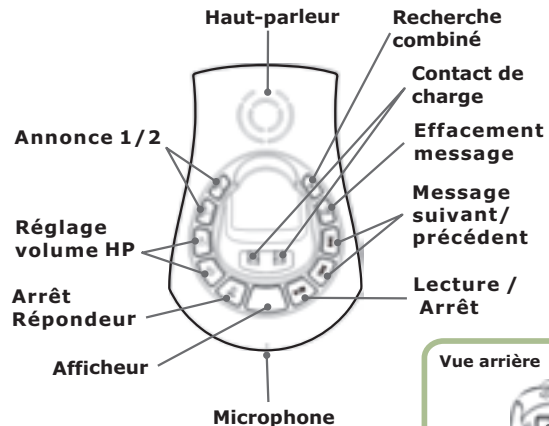

Vue arrière



Base : AMPLIDECT280™

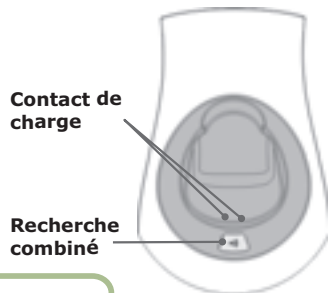

## Fonctionnalités

- 1.8GHz DECT technologie avec GAP
- Ecran 2.0" LCD (128 x 64)
- 5 combinés programmables par base
- Le combiné peut être programmé sur 4 bases différentes
- Contraste LCD ajustable
- Répertoire (50 fiches)
- Journal d'appel (10 numéros en mémoire)
- 10 choix de sonnerie avec volume ajustable (5 niveaux)
- Vibreur et flash lumineux de sonnerie
- 4 mémoires directes
- Appui des touches ON/OFF
- Main libre
- Appel interne
- Transfert d'appel
- Conférence à 3
- Volume de réception ajustable
- Touche secret
- Code PIN de protection
- Pré-numérotation du numéro

- Numérotation, Pause
- Sélection du mode de numérotation
- Temps Flash
- Affichage de la durée de l'appel
- Heure
- Verrouillage clavier
- Choix du langage
- Répondeur ON/OFF
- Réveil avec l'option snooze
- Choix du nom du combiné
- Ecran LCD et clavier lumineux

### Présentation du numéro

- Identification du numéro (FSK and DTMF)
- Présentation du numéro/Appel en absence
- Journal d'appel (40 numéros enregistrés)
- Rappel des numéros en absence / Ajout des numéros dans le répertoire
- Symbole « nouvel appel »
- Symbole « message en attente »

## ■ Ecouter votre messagerie à distance (disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)

Vous pouvez accéder à votre messagerie vocale de n'importe quel téléphone. Pour entrer le code d'accès à distance, suivez le descriptif ci-dessous:

1. Composez votre numéro de téléphone sur n'importe quel téléphone.
2. Lorsque vous entendez l'annonce de votre répondeur, entrez votre code d'accès.
3. Après avoir entré votre code, votre répondeur vous dictera les commandes disponibles.

### Note:

- Si vous entrez un code incorrect, le répondeur vous demandera d'entrer à nouveau votre code. Vous pouvez renouveler cela deux fois avant que la ligne se coupe.

### Commandes

#### Bouton



#### Fonction

Accédez au menu

Lisez les messages

Lisez les messages sauvegardés

Effacez les messages

Activez/Désactivez le répondeur


Enregistrement de l'annonce 1/2  
(selon votre programmation)

### Note:

- Il est préférable de finir l'écoute de vos messages avant de raccrocher.

## ■ Présentation des touches

### Combiné

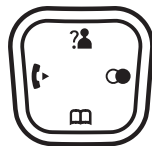

#### Touche d'appel

Appelez / Répondez.

Appuyez une seconde fois pour passer en mode haut-parleur.

#### Touche raccroche

Fin d'appel.

Mise en veille.

#### Touches de navigation:



#### Journal des appels reçus

Faites défiler la liste des appels reçus.

En conversation, augmentez le volume de l'écouteur / du haut-parleur..



#### Répertoire

Faites défiler la liste des numéros dans le répertoire.

En conversation, baissez le volume de l'écouteur / du haut-parleur.



#### Transfert de combiné

Conversation entre combiné.

Transfert d'appel entre combiné.

Conférence.

## ■ Présentation des touches (suite)



### Touche Bis

Entrez dans le journal d'appel.  
Insérez une pause lors de la pré-numérotation.



### Touches de fonction

Exécutez les fonctions textes indiquées à l'écran.



### Touche étoile

Appuyez et maintenez pour déverrouiller ou verrouiller le clavier pendant 3 secondes.  
Mise en place d'une conférence.



### Mémoires directes

Vous pouvez programmer 4 numéros en mémoires directes (de M1 à M4)





### Touche 0

En mode veille, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le symbole ∞ apparaisse, pour activer le vibreur et le flash visuelle de sonnerie. Pour désactiver cette fonction, maintenez à nouveau la touche enfoncée jusqu'à ce que le symbole ∞ disparaisse.

## Réinitialisation du répondeur

Cette fonction vous permet de configurer votre répondeur par défaut.




1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Rég Rép.** Validez en appuyant sur **Select.**
3. Appuyez sur la touche  et choisissez **Rég Std.** Ensuite, appuyez sur **Select.**
4. Entrez le code PIN (par défaut, le numéro est 0000). Ensuite, appuyez sur **RAZ.** Si le code PIN est correct, toutes les fonctions du répondeur sont remises par défaut. Si le code est incorrect, vous entendrez un bip sonore.

*Résultat: Après la réinitialisation, vous retournerez en mode veille.*

## Date et heure

Le répondeur vous annonce la date et l'heure de la réception du message.

Pour régler le jour :




Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendez le jour souhaité. Pour changer le jour, appuyez sur la touche  et validez en appuyant sur la touche .

Pour régler la date :

Référez-vous p39 : « Réglage de la date ».



## Sélection du langage

Vous pouvez choisir le langage pour vos messages d'accueil.

1. En mode veille, appuyez sur **Rép.**
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Rég Rép.** Validez en appuyant sur **Select.**
3. Appuyez à nouveau sur la touche  et choisissez **Langage Rép.** Validez en appuyant sur **Select.**
4. Les langues disponibles (Français, Anglais et Allemand) apparaissent sur l'écran LCD. Faites défiler les langues en appuyant sur la touche  et validez en appuyant sur **Select.** Vous entendrez un bip sonore de confirmation.

## Code à distance

Vous pouvez consulter vos messages à distance, à partir d'un autre téléphone. Par défaut, le code est 0000 mais, pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de changer ce numéro. Pour changer ce code, suivez l'étape suivante :

1. En mode veille, appuyez sur **Rép.**
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Rég Rép.** Validez en appuyant sur **Select.**
3. Appuyez sur la touche  et choisissez **Code dist.** Validez en appuyant sur **Select.**
4. L'écran LCD vous affiche le code actuel. Entrez votre nouveau code et validez en appuyant sur **OK.**

## Présentation des touches (suite)

Base : disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™



### Marche / Arrêt

Mise en Marche / Arrêt du répondeur.



### Touche Annc1/Annc2

Appuyez sur la touche Annonce 1 ou Annonce 2 pour écouter votre annonce d'accueil ou l'annonce enregistrée. Appuyez et maintenez la touche pour enregistrer l'annonce 1 ou l'annonce 2 jusqu'au Bip et appuyez sur stop une fois l'enregistrement fini.



### Touche Lecture / Arrêt

Appuyez sur Lecture ou Arrêt pour écouter vos messages ou vos mémos.



### Touche effacer

Lorsque vous avez écouté vos messages, maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les messages.



### Message suivant / message précédent

Appuyez sur Avance pour écouter les messages (appuyez deux fois sur la touche pour écouter le message suivant).



### Touche Volume

Appuyez sur une de ces touches pour augmenter ou baisser le volume des messages diffusés.

## Description des symboles



### Nouvel appel

Indique un ou plusieurs appels manqués.



### Message en attente

Indique un ou plusieurs messages en attente.



### En ligne

Indique que vous êtes en ligne.



### Main Libre

Indique que vous êtes en main libre.



### Batteries

Indique le niveau des batteries.



### Vibreur

Indique que le vibreur et le flash lumineux de sonnerie sont actifs.



### Réseau

Indique la qualité de réception du réseau. Si vous êtes trop éloigné de la base de votre téléphone, le symbole disparaîtra de votre écran.



### Réveil

indique que vous avez programmé votre réveil.



### Verrouillage du clavier

Indique que vous avez verrouillé le clavier.



### Répondeur

Indique que vous avez un message sur votre répondeur.

## Sélectionnez votre choix d'annonce

Vous pouvez choisir entre deux modes d'annonce. Pour configurer celle que vous souhaitez, suivez l'étape suivante :

1. En mode veille, appuyez sur **Rép.**
2. Appuyez sur la touche et choisissez **Rég Rép.** Validez en appuyant sur **Select.**
3. Appuyez sur la touche et choisissez **Sélec ANNC.** Validez en appuyant sur **Select.**
4. Utilisez la touche et choisissez **Annonce 1 ou Annonce 2.** Validez en appuyant sur **Select.**

### Notes:

- Si votre boîte de réception est pleine, l'annonce 2 se mettra automatiquement par défaut.
- Si vous sélectionnez le mode « Annonce 1 », vos interlocuteurs pourront vous laisser des messages.
- Si vous sélectionnez le mode « Annonce 2 », aucun message ne pourra être enregistré.

## Réglage de la sonnerie

Vous avez le choix entre 5 sonneries, allant de 2 à 6, et le mode Signal Sauvé. Si vous choisissez la fonction Signal Sauvé, le répondeur s'enclenchera au bout de 3 sonneries, sinon il s'enclenchera au bout de 6 sonneries.



1. En mode veille, appuyez sur **Rép.**
2. Appuyez sur la touche et choisissez **Rég Rép.** Validez en appuyant sur **Select.**
3. Appuyez sur la touche et choisissez **Rég Sonn.** Validez en appuyant sur **Select.**
4. Utilisez la touche et choisissez votre sonnerie ou le Signal Sauvé. Validez en appuyant sur **Select.**

## ■ Réglage du répondeur (disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)


### Répondeur ON/OFF

Vous avez le choix d'activer ou de désactiver le répondeur.

#### **Solution 1: Utilisez le menu**



1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage Répondeur**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Appuyez à nouveau sur **Select** et choisissez **Répondeur On/Off**.
4. Utilisez la touche  et choisissez **On** ou **Off**, Validez en appuyant sur **Select**.

#### **Solution 2: Utilisez la base**

En mode direct, appuyez sur la touche  située sur la base pour activer ou désactiver la fonction.


### Alerte Répondeur

Si vous avez un(des) message(s) en attente(s), vous entendrez un bip sonore jusqu'à la lecture de vos messages. Vous avez le choix d'activer ou de désactiver cette sonnerie.

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage Répondeur**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Choisissez dans le menu **Alerte Répondeur** et validez en appuyant sur **Select**.
4. Utilisez la touche  et choisissez **On** ou **Off**, validez en appuyant sur **Select**.

## ■ Raccordements

- Branchez le cordon de ligne à l'arrière de la base.
- Branchez la fiche téléphone dans votre prise murale.
- Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à l'arrière de la base.
- Branchez le bloc secteur dans votre prise murale (230V).

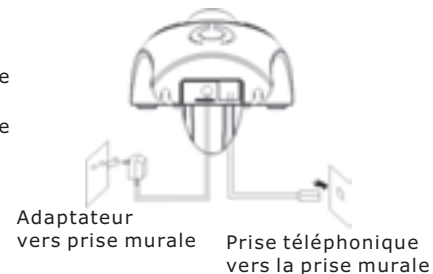

## ■ Installation du bloc de batterie

Le téléphone est livré avec des batteries 3 AAA Ni-MH rechargeables.

1. Glissez le couvercle vers le bas du logement batterie.
2. Insérez les 3 batteries en respectant la polarité (+,-).



## ■ Installation du bloc de batterie (suite)

### 3. Refermez le couvercle comme indiqué.



#### Notes:

- Les batteries devront être remplacées lorsque leur autonomie sera réduite après charge.
- Il est impératif d'utiliser des batteries similaires de bonne qualité Ni-MH. N'utilisez jamais d'autres types de batterie.

## ■ Mise en service du combiné

**Note importante :** Avant toute mise en service, **VOUS DEVEZ CHARGER COMPLÈTEMENT LE COMBINÉ** pendant **15 heures**.



Pour charger, placez-le sur la base.

**Résultat:** Lorsque vous placez le combiné sur la base, il se met automatiquement en service.




## Supprimer les messages

### Solution 1: Utilisez le menu

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Message**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Supprimer Tout**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Le message **Confirmé ?** apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur **OK** pour tous les effacer ou **Annuler** pour sortir.

### Solution 2: Utilisez la base



En mode direct, appuyez et maintenez la touche  pour effacer tous les messages. Vous entendrez un message de confirmation.

#### Note:


- Vous pouvez enregistrer 15 minutes de message.

## Enregistrez un mémo

Avec cette fonction, vous pouvez laisser un message à votre famille. Si vous désirez laisser un mémo, suivez les instructions suivantes:

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur la touche de navigation  et choisissez **Message**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche de navigation  et choisissez **Enregistrer un mémo**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Vous pouvez enregistrer votre message après le bip sonore. Validez en appuyant sur **OK**.

#### Note:


- Si quelqu'un vous a laissé un mémo, le symbole  apparaîtra sur votre écran LCD, en mode veille.


## Message (disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)

Cette fonction vous permet de laisser un message sur le répondeur. Le répondeur s'enclenche avec l'annonce 1 et vous pouvez laisser un message après le bip sonore.




**Ecouter le(s) nouveau(x) message (s) ou les messages sauvés.**




### Solution 1: Utilisez le menu

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Message**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Appuyez à nouveau sur **Select** et choisissez **Nouveau Message** ou sur **Message Sauvé**. Validez en appuyant sur **Select**.



4. Le téléphone vous annonce : « **Vous avez X nouveau(x) message(s)** » ou « **Vous avez des nouveau(x) message(s) sauvé(s)** ». Les messages défilent un à un. Pour les effacer, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Retour** pour écouter les autres messages.

### Solution 2: Utilisez la base

Lorsque vous avez un ou plusieurs messages, appuyez sur la touche  pour les écouter. Utilisez la touche  ou la touche  pour écouter le message que vous souhaitez.

Pour réécouter le message, appuyez sur la touche . Si vous n'avez aucun message, appuyez sur la touche  pour écouter les messages sauvés. Pour terminer, appuyez sur la touche .


#### Note:

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche  ou sur la touche .

## Utilisation du clip ceinture

Le clip ceinture vous permet de garder le combiné sur vous. Il s'attache facilement à votre ceinture ou à votre poche.

Si vous souhaitez retirer le clip ceinture : **Libérez le clip à l'aide d'un tournevis. Puis, soulevez le support sur un des 2 côtés.**

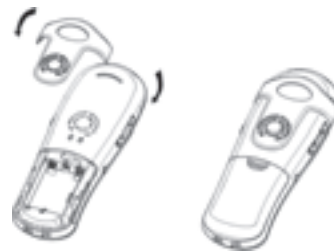


## Utilisation de l'écouteur (option)

Vous pouvez utiliser un écouteur ayant un connecteur de 2.5mm. La prise se situe sur le côté gauche du combiné. Connectez simplement l'écouteur dans la prise pour activer cette fonction.


#### Note:

- Si l'écouteur est branché, le microphone du combiné sera désactivé.

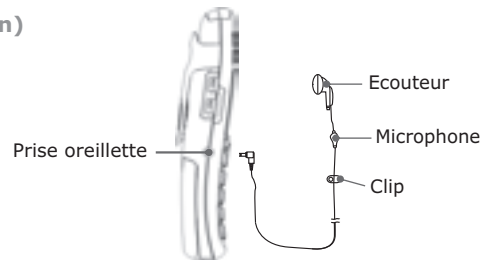

## Montage Mural

Placez la pièce pour le montage mural sous le téléphone. Percez 2 trous distants de 60mm dans votre mur pour y insérer 2 chevilles avec leurs vis. Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Placez votre téléphone sur les têtes de vis et faites glisser ensuite la base du téléphone dans les ouvertures.

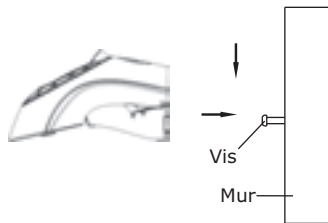


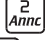

## Ecouter vos annonces

Vous pouvez écouter l'annonce 1 et l'annonce 2 .

### Solution 1: Utilisez le menu


1. En mode veille, appuyez sur Répondeur.
2. Appuyez sur **Select** et choisissez dans le menu **Annonce**.
3. Appuyez sur **Select** et choisissez **Annonce 1** ou **Annonce 2**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Appuyez sur **Select** et choisissez **Lecture**.

### Solution 2: Utilisez la base




En mode direct, appuyez sur la touche  ou sur la touche  situées sur la base. Appuyez sur la touche  pour écouter votre annonce.

## Rétablir l'annonce 1 ou l'annonce 2

### Solution 1: Utilisez le menu

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur **Select** et choisissez **Annonce**.
3. Appuyez sur **Select** et choisissez **Annonce 1** ou **Annonce 2**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Appuyez sur la touche de navigation  et choisissez dans le menu **Défaut**. Ensuite, validez en appuyant sur **Select**.
5. Le message **Confirmé ?** apparaît sur l'écran LCD. Validez en appuyant sur **Select**.

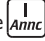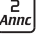

### Solution 2: Utilisez la base

En mode direct, appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour écouter l'annonce 1 ou 2. Ensuite, appuyez et maintenez la touche  pour restaurer la configuration par Défaut. Vous entendrez un bip de confirmation.




## Enregistrement de l'annonce 2

L'annonce 2 vous permet uniquement de laisser un message d'accueil. Si vous n'avez pas encore enregistré de message, par défaut l'annonce est « **Votre appel ne peut aboutir, veuillez rappeler ultérieurement** ».

Si vous voulez changer l'annonce 2, suivez l'étape suivante :

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.
2. Appuyez sur **Select** et choisissez **Annonce**.
3. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Annonce 2**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Appuyez sur la touche  et choisissez **Enregistrer**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
5. Vous pouvez enregistrer votre message après le bip sonore. L'enregistrement s'arrêtera après 3 minutes. Validez en appuyant sur **OK**.

## Enregistrez vos annonces à partir de la base

Appuyez et maintenez la touche  ou la touche  situées sur la base. Parlez après le bip sonore. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche .


### Notes:

- Pour un meilleur enregistrement de votre annonce à partir de la base, parlez à 20 cm du microphone.
- A tout moment, vous pouvez changer votre annonce et la reconfigurer par défaut..


## Mise en service ou hors service du combiné

Une fois reposé sur la base, le combiné est automatiquement activé.

### 1. Mise en service :


Pour mettre en service le combiné lorsque l'afficheur est éteint, appuyez et maintenez la touche .

L'afficheur indique « Recherche ... » et le symbole apparaît (voir ci-dessous), la connexion avec la base est établie.

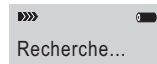

### Note:

- Si la fonction « Recherche... » aboutie, votre combiné se mettra en mode veille. le nom et le numéro du combiné (voir description p.24), la qualité du réseau, le niveau de la batterie et l'heure. A l'inverse, votre téléphone est hors service.

2. Mise hors service: appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran s'éteint.

### Note:

- Si les batteries sont faibles, l'écran ne s'allume pas. VOUS DEVEZ CHARGER LES BATTERIES AVANT D'UTILISER LE COMBINÉ.

## Fonction de base

### ■ Appelez

Première solution : en mode direct

1. Prenez le combiné et appuyez sur la touche



*Résultat:* Le symbole **(1)** apparaît sur l'écran.

2. Composez le numéro de votre

**Note:**

- Vous pouvez mettre en mémoire 10 numéros de téléphone

3. La conversation terminée, reposez le combiné sur sa base ou appuyez sur la touche



**Note:**

- Pour appeler le dernier numéro composé, utilisez la fonction Bis . (description p.18)

Deuxième solution : en mode veille

Ce mode permet la correction d'une erreur de frappe de numéro entré.

1. Composez le numéro de téléphone. Pour corriger une erreur, utilisez la touche de fonction **Droite**.

2. Une fois le numéro vérifié, appuyez sur la touche pour accéder à la ligne.

## Fonctions du répondeur

(disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)

### ■ Annonce

En cas d'absence, vous pouvez enregistrer un message d'accueil sur votre répondeur. Deux types d'annonces sont possibles :

- annonce 1 : vous permet de personnaliser votre répondeur et d'enregistrer les messages.

- annonce 2 : vous permet uniquement de laisser un message d'absence.

#### Enregistrement de l'annonce 1

Si vous n'avez pas personnalisé votre message d'accueil, le message par défaut est : « **votre appel ne peut aboutir, pour enregistrer votre message, parlez après le bip** ».

Si vous voulez changer l'annonce 1, suivez l'étape suivante :

1. En mode veille, appuyez sur **Répondeur**.

2. Appuyez sur la touche **Select** et choisissez **Annonce**.


3. Appuyez une seconde fois sur **Select** et choisissez **Annonce 1**.

4. Appuyez sur la touche et choisissez **Enregistrer**. Ensuite, appuyez sur **Select**.

5. Vous pouvez enregistrer l'annonce après le bip. L'enregistrement s'arrêtera après 3 minutes. Ensuite, vous pouvez confirmer en appuyant sur **OK**.

## Fonction double appel

Ce service est disponible uniquement si vous avez souscrit à l'abonnement « Double appel » chez France Télécom. Par ce service, vous êtes prévenus de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication. Vous pouvez ainsi prendre cet appel et passer d'un correspondant à l'autre. Tout en étant en communication avec l'interlocuteur 1, l'afficheur indique le nom et le numéro de l'interlocuteur 2.

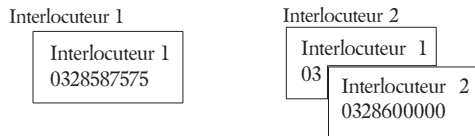

1. Vous êtes en conversation avec l'interlocuteur 1.
2. Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un signal sonore.

3. Le nom et le numéro de téléphone de l'interlocuteur 2 sont alors affichés.

4. Appuyez sur la touche « **R** »+2 pour répondre au 2ème interlocuteur.

5. Pendant ce temps, l'interlocuteur 1 est en attente.


6. Appuyez sur la touche « **R** »+2 pour terminer la conversation avec l'interlocuteur 2. Vous pouvez ensuite reprendre la conversation avec l'interlocuteur 1.


## Recevoir un appel

-Si le numéro peut être identifié, le numéro de téléphone s'affichera.

-Si le numéro est inconnu, « Nouvel Appel » apparaît.




-Si vous avez un message vocal en attente, « **Message en attente** » et le symbole  apparaîtra sur l'écran LCD.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche . Si vous avez activé la fonction « Réponse automatique », il vous suffit juste de prendre le combiné sur sa base pour répondre.

2. Parler dès la communication obtenue. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  ou replacer le combiné sur sa base.

**Résultat:** Dès que vous raccrochez, l'écran affiche la durée de l'appel.

### Notes:

- Vous pouvez sélectionner le volume de sonnerie en appuyant sur les touches **Vol+/-** lorsque le téléphone sonne.
- Si vous souhaitez effacer le symbole  appuyez sur la touche de navigation en mode veille, puis appuyez et maintenez la touche . Ensuite, appuyez sur la touche  pour retourner en mode veille.
- Si la sonnerie polyphonique est choisie, la mélodie continuera de sonner pendant 4 secondes après que vous avez répondu à un appel interne.

## ■ Fonction secret

Cette fonction permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.

**Exemple:** Vous souhaitez dire quelque chose à une autre personne dans la pièce mais vous ne voulez pas que votre correspondant l'entende.

Pour couper le micro : en conversation, appuyez sur la touche **Secret**. « **Mode secret** » apparaît sur l'écran LCD.

Pour rétablir le micro : appuyez une nouvelle fois sur la touche **Secret** pour rétablir la conversation.

## ■ Fonction Amplification





Votre téléphone est équipé d'une fonction amplification supplémentaire. En appuyant sur la touche **AMP** située sur la côté droit du combiné, vous augmenterez de 15 dB le volume de réception. Lorsque la fonction est activée, le voyant lumineux sera allumé en haut de votre combiné..

La touche **Tone** permet: d'augmentez de 10 dB les basses fréquences (**Tona 1**), de rester en écoute normale (**Tona 2**) ou d'augmentez de 10dB les hautes fréquences (**Tona 3**).Vous pouvez ajuster le volume en appuyant sur les touches **Vol+** ou **Vol-** situées sur le côté gauche du combiné.

Vous pouvez programmer le volume de réception au décrocher à partir du menu dans « Réglage du combiné », répertoire « Réglage de l'audio» (voir p38).

## Conférence à 3


Lorsque vous êtes en communication simultanée avec l'extérieur et en interne, vous pouvez établir une conversation à 3.

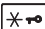1. En conversation, appuyez sur la touche  de navigation.Appuyez sur la touche « R » et appuyez sur le numéro de combiné que vous souhaitez inviter à la conversation (par exemple le 2).
2. Le combiné 2 sonne. Appuyez sur la touche  pour répondre. Pour activer la conférence à trois,appuyez sur la touche .
3. Pour quitter la conférence à tout moment, appuyez sur la touche  pour raccrocher.


## Fonctionnement en multi-combinés

Vous pouvez communiquer entre deux combinés enregistrés sur la même base.



### Appelez en appel interne

1. Appuyez sur la touche de fonction Interphone  et saisissez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler (par exemple 3).





2. Le combiné 3 sonne.
3. La conversation terminée, fermez le combiné en appuyant sur la touche .

#### Note:

- Si un appel externe arrive lors d'une conversation interne, vous verrez apparaître sur votre écran le numéro de l'appelant. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la conversation interne et appuyez ensuite sur la touche  pour prendre le nouvel appel.




### Transfert d'un appel externe d'un combiné vers un autre


Vous pouvez transférer une communication externe vers un autre combiné de la même base.

1. En conversation, appuyez sur la touche « R » et saisissez le numéro du combiné vers lequel vous désirez transférer l'appel (le 4 par exemple).
2. Le 4 sonne. Ouvrez le combiné 4 et appuyez sur la touche  pour parler.
3. Une fois le transfert effectué, appuyez sur la touche .

## Sonnerie

Vous pouvez choisir votre sonnerie interne et externe et ajuster le volume.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage Combiné**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage Mélodie**, et appuyez sur **Select**.
4. Appuyez sur **Select** et choisissez Appel INT ou Appel EXT. Et appuyez sur **Select**.
5. Appuyez sur la touche  et choisissez Mélodie ou Volume. Et appuyez sur **Select**.


**Résultat:** Appuyez sur la touche  pour choisir les mélodies ou ajuster le volume de sonnerie de 1 à 5.

6. Appuyez sur **Sauve** pour confirmer.

#### Note:

- Lorsque vous avez désactivé la sonnerie et que l'on vous appelle, « Nouvel Appel » apparaît sur votre écran LCD.

## Rappel du dernier numéro


1. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation .


**Résultat:** L'écran LCD affiche le dernier numéro composé.

2. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Votre téléphone vous permet de retrouver les 10 derniers numéros que vous avez composés et de les rappeler rapidement.

### Recherchez un numéro dans le journal

1. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation .

2. Faites défiler les numéros en mémoire en appuyant sur la touche  jusqu'à ce que vous ayez trouvé le numéro recherché.


3. Appuyez sur la touche  pour appeler.


#### Notes:

- Si aucun numéro n'est trouvé, le message « vide » apparaît sur l'écran LCD.
- Lorsque le journal des appels est plein, le plus ancien numéro est écrasé par le dernier numéro composé.

### Option du journal d'appel

En utilisant les options du journal d'appel, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone dans le répertoire ou supprimer un numéro dans le journal d'appel.

1. Appuyez sur la touche .


2. Appuyez sur la touche  pour faire défiler le numéro.

3. Lorsque le numéro apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur la touche de fonction Plus pour choisir l'option :

## Enregistrement d'un combiné

### Déclarer un nouveau combiné sur la base

Le combiné fourni est déjà déclaré par défaut sous le nom de Base 1. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 combinés par base.

Avant tout enregistrement de combiné supplémentaire, appuyez et maintenez 5 secondes sur la touche  située sur la base.

1. Appuyez sur **Menu**.

2. Choisissez dans le menu **Enregistrer** et validez en appuyant sur **Select**.

3. Faites défiler la liste des bases et choisissez base 1. Validez en appuyant sur **Select**.


4. Si la configuration a bien été prise en compte, vous pouvez entrer le code PIN (le code est par défaut 0000) et validez en appuyant sur **Select**.

5. Si votre code PIN est correct, vous entendrez un bip sonore de confirmation. Si le code PIN est incorrect, vous entendrez un bip sonore d'erreur et votre combiné retournera à son enregistrement précédent.

6. Si la base n'a pas réussi à enregistrer le combiné, il sera hors service.



## Déclarez une nouvelle base

Un combiné peut être enregistré sur une base différente, initialement déclaré sous le nom de base 1.

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Configuration du réveil » p26.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Select Base**, et validez en appuyant sur **Select**.
3. Utilisez la touche  et sélectionnez la base que vous souhaitez et validez en appuyant sur **Select**. Si vous sélectionnez une base non existante, vous entendrez un bip sonore d'erreur.
4. L'écran affiche les bases disponibles. Validez en appuyant sur **Select**. Vous entendrez un bip sonore de confirmation.


## Amplification

Votre téléphone est spécialement équipé d'une fonction d'amplification supplémentaire. Lorsque vous programmer la fonction sur ON, le volume d'écoute se situe entre 15-30dB. (0-15dB sur position OFF).

1. Appuyez sur la touche Menu
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage combiné**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Amplifié**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Choisissez **On** ou **Off** pour activer ou désactiver cette fonction. Validez en appuyant sur **Select**.

## RAZ Combiné

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres de réglage du combiné de manière à disposer d'un combiné identique aux réglages disponibles à la livraison.


1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Configuration du réveil » p26.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **RAZ Combiné**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Entrez le code PIN (le code par défaut est 0000), ensuite validez en appuyant sur **RAZ**.

*Résultat: Après la réinitialisation du combiné, vous retournerez en mode veille.*

**Ajout Rep:** permet d'ajouter un numéro dans le répertoire. Entrez le nom et appuyez sur **Suivant**. Contrôlez le numéro de téléphone (vous pouvez le modifier en appuyant sur **Modifier**). Choisissez la **Mélodie** et appuyez sur **Suivant**.

**Supprimer** : vous permet de supprimer le numéro sélectionné.



**Supprimer tout:** vous permet de supprimer entièrement le journal d'appel.

4. Pour retourner en mode veille, appuyez sur la touche .

### Note:

- Lorsque vous « supprimer » ou « supprimer tout », le message « confirmé ? » apparaît sur l'écran LCD. Pour confirmer, appuyez sur OK ou pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur Annul.

## Liste d'appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de votre interlocuteur s'affiche sur votre écran LCD (si vous avez souscrit au service présentation du numéro). Le symbole  apparaît sur votre écran LCD si vous avez manqué un appel. Lorsque la liste d'appel est saturée, le symbole  clignotera sur votre écran LCD.



**Hors zone** - ce message apparaît sur votre écran LCD si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple).

**Privé** - Le message « privé » apparaît sur votre écran LCD lorsque votre interlocuteur vous appelle en numéro caché.



### Consultez les numéros de la liste d'appel.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.

2. Utilisez la touche **Select** pour choisir la liste d'appel et si les numéros sont disponibles, ils s'afficheront sur votre écran LCD. (En mode veille, vous pouvez accéder directement à la liste d'appel en appuyant sur la touche de navigation Journal des appels reçus).



3. Utilisez la touche  pour faire défiler les numéros. Pour appeler, appuyez sur la touche . Vous pouvez également entrer ces numéros dans votre répertoire téléphonique.

#### Note:

- A l'étape 3, chaque appel reçu est marqué soit par le symbole  s'il a été consulté soit par le symbole  s'il n'a pas encore été consulté..

## Paramétrage du contraste de l'écran LCD


L'ajustement du contraste vous permet d'optimiser la visibilité de votre écran LCD.

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Réveil », p26.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Contraste**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche navigation **Répertoire** et choisissez votre niveau de contraste. Validez en appuyant sur **Sauvé**.
4. Appuyez sur la touche  pour retourner en mode veille.

## Programmez la date et l'heure

### 1. Date et format de l'heure

- 1A. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Réveil », p26.


- 2A. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Date & Heure**. Ensuite, appuyez sur **Select**.

- 3A. Utilisez la touche  et choisissez **Format date** ou **Format Heure** et appuyez sur **Select**.

- 4A. Vous avez le choix entre deux formats. Validez en appuyant sur la touche **Sauve** pour confirmer votre choix.




### 2. Réglage de la date

- 1A. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe précédent.

- 2A. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Régler Date** et **Régler Heure**. Validez en appuyant sur **Select**.



## Réglage de l'audio

Vous pouvez ajuster le niveau du volume de l'audio.

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe précédent.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Réglage Audio**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Utilisez la touche  et choisissez dans le menu **Volume HP** ou **Volume Ecoute**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Utilisez la touche  et choisissez le niveau du volume (de 1 à 5 ) et validez en appuyant sur **Sauve**.

## Appui des touches


A chaque appui sur une touche de votre clavier, un signal sonore est émis.

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe «Réveil » p26
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Réglage Tonalité**. Validez en appuyant sur **Select**.
3. Choisissez dans le menu **BIP Clavier**.
4. Utilisez la touche  et choisissez **On** pour activer la fonction **BIP Clavier** ou **Off** pour désactiver cette fonction.
5. Validez en appuyant sur **Sauve**.


### Note:

- *Nous vous recommandons de laisser la fonction « Appui des touches » pour une meilleure utilisation.*

## Ajoutez un numéro de votre liste d'appel dans votre répertoire

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe précédent
2. Utilisez la touche  pour consulter les numéros. Appuyez sur la touche de fonction **Plus** et entrez dans le menu **Ajout Rep**.
3. Entrez le nom et appuyez sur **Suivant**. Ensuite, vous pouvez modifier le numéro si celui-ci est incorrect.
4. Appuyez sur **Suivant**. Vous pouvez choisir une Mélodie. Ensuite, appuyez sur **Sauve** pour confirmer. Vous entendrez un bip sonore pour confirmation.

## Effacer un numéro dans la liste d'appel

1. Suivez les étape 1 et 2 du paragraphe précédent.
2. Choisissez le numéro que vous souhaitez effacer en utilisant la touche .

3. Appuyer sur la touche de fonction **Plus** et choisissez **Supprimer**. Ensuite, appuyez sur **Select**. Le message « **Confirmé ?** » apparaît sur l'écran LCD. Ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous entendrez un bip de confirmation et vous passerez au numéro suivant.

## Effacez tous les numéros dans le journal d'appel



1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe «Consultez les numéros de la liste d'appel », p 22.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Plus** puis, choisissez **Tout supp** et ensuite appuyez sur **Ok**.
3. Le message "**Confirmé ?**" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



*Résultat: une fois que le journal d'appel sera effacé un bip sonore retentira et vous retournerez en mode veille.*

## ■ Verrouillage

Cette fonction est utile pour éviter une activation accidentelle du téléphone.

Pour répondre, appelez sur la touche .

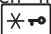Pour verrouiller le clavier : en mode veille, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'écran LCD affiche « **Comb. bloqué** » (le symbole  apparaît sur l'écran LCD).

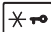
Pour déverrouiller le clavier : appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que le symbole  disparaisse de l'écran LCD.


### **Note:**

- En mode verrouillage, vous n'accédez à aucune fonction du clavier. Le message « combiné bloqué » apparaît sur l'écran LCD et vous entendrez un bip sonore de confirmation.

## ■ Torche

Vous pouvez utiliser votre combiné comme une torche.

Pour activer cette fonction : en mode veille, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant lumineux soit continu.

Pour désactiver cette fonction : appuyez une seconde fois sur la touche  jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.


## ■ Réglage combiné

### **Réveil**

Pour programmer le réveil, reportez-vous à la page 26.


## Modifiez le code PIN

Cette fonction vous permet de changer le code PIN de votre téléphone. Par défaut, le code est 0000.

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Réglage BS » p35.
2. Utilisez la touche  et choisissez dans le menu **Modifier PIN**. Appuyez sur **Select**.
3. Le message « **PIN?** » apparaît sur votre écran LCD. Entrez le code PIN actuel et appuyez sur la touche **Suivant**. Si l'ancien code PIN est correct, vous pouvez entrer votre nouveau code. S'il est incorrect, vous entendrez un bip sonore d'erreur et vous retournerez dans le menu Modifier PIN.
4. Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur la touche **Suivant**. Le message « **Confirmé ?** » apparaît sur l'écran LCD et entrez une seconde fois votre nouveau code. Validez en appuyant sur **Sauve**.

## RAZ Base




Cette fonction vous permet de réinitialiser les paramètres de réglage du combiné de manière à disposer d'un combiné identique aux réglages disponibles à la livraison.

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Supprimé le combiné » p35.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu **Raz base** et appuyez sur **Select**.
3. Entrez le code PIN (le code PIN par défaut est 0000) et appuyez sur RAZ.

*Résultat: La base sera réinitialisée et le combiné retournera en mode veille.*

## Réponse automatique

Cette fonction vous permet de répondre à un appel simplement en décrochant le combiné de sa base.




1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage combiné**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Utilisez la touche  et choisissez **Réponse automatique**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
4. Utilisez la touche  et choisissez la fonction **On/Off**. Ensuite, appuyez sur **Sauve**. Vous entendrez un bip sonore de confirmation.

### Note:

- Si le répondeur s'enclenche, cette fonction est désactivée. (uniquement disponible avec l'AMPLIDECT285)


## Sélection du langage

Vous pouvez choisir le langage de présentation de l'afficheur. Pour choisir un langage différent du français, suivez la procédure suivante :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage Combiné**, puis appuyez sur **Select**.
3. Utilisez la touche  pour choisir le **Langage** et appuyez sur **Select**.
4. Les différents langages apparaissent sur l'écran. Utilisez la touche  pour faire défiler les autres langages disponibles. Toutes les fonctions du téléphone seront retranscrites dans le langage que vous avez choisi.
5. Appuyez sur **Sauve** pour sauvegarder votre choix. Vous entendrez un bip sonore de confirmation.



## ■ Attribution d'un nom

Grâce à cette fonction, vous pouvez définir un nom à votre combiné :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez Réglage combiné. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Sélectionnez nom combiné en utilisant le clavier alphanumérique et entrez le nom. Pour effacer les lettres incorrectes, utilisez la touche **Efface**. Quand votre nom est correct, appuyez sur **Sauve** pour confirmer et sortir. Le nom s'affiche sur votre écran LCD au-dessus de votre numéro de combiné en mode veille.

## ■ Réveil



Cette fonction vous permet de programmer une alarme sonore à l'heure définie.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche et choisissez **Réglage combiné**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Utilisez la touche  et choisissez **Alarme**. Validez en appuyant sur **Select**.
4. Utilisez la touche  et choisissez **On/Off** pour activer ou désactiver l'alarme. Ensuite, validez en appuyant sur **Sauve**. Vous entendrez un bip sonore de confirmation.
5. Entrez l'heure pour programmer votre réveil et validez en appuyant sur **Suivant**.
6. Choisissez la fonction **Buzzer Marche-Arrêt** et validez en appuyant sur **Sauve**. Pour éteindre le réveil, appuyez sur n'importe quelle touche.

## ■ Réglages BS



### Supprimer un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer la configuration du combiné de base.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglage Base**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Choisissez dans le menu **RAZ Combiné** et validez en appuyant sur **Select**. Le message « PIN ? » apparaît sur l'écran LCD et vous pouvez entrer le code PIN (le code par défaut est 0000). Ensuite, appuyez sur **RAZ**. Appuyez sur **OK**.
4. Utilisez la touche  pour sélectionner un combiné. Si vous sélectionnez le combiné actuel ou un combiné inexistant, vous entendrez un bip sonore d'erreur.
5. Appuyez sur **Select** pour confirmer et sélectionnez le combiné correspondant.

### Temps flash


Vous pouvez changer le temps du flash en suivant le paragraphe ci-dessous :

1. Appuyez sur Menu.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Réglages BS**. Ensuite, appuyez sur **Select**.
3. Utilisez la touche  et choisissez dans le menu **Temps Flash**. Appuyez sur **Select**.
4. L'écran vous montre les temps flash disponibles (Flash 1 ou Flash 2). Validez en appuyant sur **Sauve**. Pour la France, le temps Flash 2 est de 270ms. Le flash 1 est de 100ms.


## ■ Mémoires directes

Vous pouvez entrer 4 numéros en mémoires directes. Tous ces numéros sont enregistrés dans le répertoire.

### Enregistrez les mémoires directes

1. En mode veille, appuyez sur une des touches **M1, M2, M3** ou **M4**.
2. Le message « **Numéro ?** » apparaît à l'écran. Entrez le numéro que vous souhaitez et appuyez sur **Suivant**.
3. Utilisez la touche  et sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez lui attribuer. Validez en appuyant sur **Sauve**.

### Consultez les mémoires directes

1. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation **Répertoire**.
2. Appuyez sur la touche  pour faire défiler votre répertoire ou appuyez sur la première lettre du nom de votre correspondant pour faire une recherche alphanumérique.

### Composer une mémoire directe

En mode veille, appuyez sur une des touches de mémoire directe et votre numéro se composera automatiquement.

### Modifiez une mémoire directe

Suivez les étapes du paragraphe « Modifiez les fiches du répertoire », p33 pour modifier un numéro en mémoire directe.

#### Note:


- Les mémoires directes sont appelés par défaut M1, M2, M3, M4. Vous pouvez leur ajouter un nom mais vous ne pouvez pas les supprimer. exemple : M1:Maison

### Effacez une mémoire directe

Suivez les étapes du paragraphe « Effacez une fiche dans le répertoire », p 33.

## ■ Recherche combiné



Utilisez cette fonction pour retrouver le combiné égaré ou appeler le porteur du combiné.

Pour envoyer un signal de localisation : appuyez brièvement sur la touche  située sur la base. Tous les combinés enregistrés sur la base sonneront.

Pour stopper le signal de localisation, appuyez à nouveau sur la touche  située sur la base ou sur une touche quelconque du combiné.

## ■ Mode de numérotation

Vous pouvez changer le mode de numérotation en suivant les indications ci-dessous:

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez rapidement sur la touche  et choisissez **Réglage BS**. Ensuite, validez en appuyant sur **Select**.
3. Utilisez la touche  et choisissez **Mode de numérotation**. Ensuite, validez en appuyant sur **Select**.
4. Vous avez la possibilité de choisir entre deux options : soit **fréquences vocales** soit **décimal**. Pour valider, appuyez sur **Sauve**. Vous entendrez un bip sonore de confirmation.


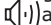
#### Note:



- N'hésitez pas à contacter le service après-vente pour tout problème avec la configuration de cette fonction.

## Mains libres

Cette fonction vous permet, après avoir composé le numéro d'appel, de communiquer avec votre correspondant sans avoir le combiné à l'oreille.

Vous êtes en communication et vous désirez passer en mode « main libre ».

En ligne, appuyez sur la touche . Le symbole  apparaît sur l'écran LCD.

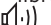Pour désactiver le mode « main libre », appuyez à nouveau sur la touche . Le symbole  disparaît de l'écran LCD.

## Signal d'appel

Si cette fonctionnalité a été activée auprès de votre opérateur, votre téléphone indiquera le numéro et le nom du second appelant (double appel) alors que vous êtes en conversation avec le premier.

Lors de la réception d'un double appel, il vous suffit d'appuyer sur « **R** » et ensuite **2** pour basculer vers le second appel. Un nouvel appui sur « **R** » et ensuite sur **1** rebascule vers le premier appel et raccroche le second appel.


## Appelez un correspondant à partir du répertoire


Référez-vous au paragraphe « Visualisez les fiches créées », p.30. Ensuite, appuyez sur la touche



### Modifiez les fiches du répertoire

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Ajoutez un numéro dans le répertoire », p.30.

2. Appuyez sur la touche  et choisissez dans le menu Modifiez fiche. ensuite, validez en appuyant sur **Select**.


3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la fiche que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Select** pour confirmer.


4. Appuyez sur **Effacer** et entrez le nom et le numéro que vous souhaitez modifier. Validez en appuyant sur **Suivant**.

5. Appuyez sur **Suivant** pour sélectionner une sonnerie. Validez en appuyant sur **Sauve**.

## Effacez une fiche du répertoire

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe « Ajoutez des fiches dans le répertoire », voir p.30.

2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Supprimer Fiche**. Validez en appuyant sur **Select**.

3. Appuyez sur la touche  et choisissez la fiche que vous souhaitez supprimer. Validez en appuyant sur **Select**. Le message « **Confirmé ?** » apparaît sur l'écran LCD. Vous pouvez appuyer sur **OK** ou **Annuler** pour sortir.



4. A l'étape 2, si vous choisissez dans le menu **Tout supprimer**, le message « **Confirmé ?** » apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur **Ok** pour tout supprimer ou sur **Annuler** pour sortir.

### Etat du répertoire

L'état du répertoire comptabilise le nombre total de fiches créées dans votre répertoire.

Appuyez sur **Menu** et choisissez **Répertoire**, puis **Etat du Répertoire**. Validez en appuyant sur **OK**.


## Ajoutez un numéro dans le répertoire

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  et choisissez **Répertoire**. Validez en appuyant sur **Select**
3. Choisissez **Ajouter Fiche** et validez en appuyant sur **Select**.
4. Le message « **Nom ?** » apparaît sur votre écran LCD. Entrez le nom de votre contact et appuyez sur **Suivant** pour confirmer. Le message « **Numéro ?** » apparaît sur votre écran LCD. Entrez le numéro souhaité et appuyez sur **Suivant**.
5. Utilisez la touche  pour sélectionner la sonnerie que vous voulez associer à ce numéro. Validez en appuyant sur **Sauve**.


### Note:

- Si vous faites une erreur dans l'enregistrement du numéro, appuyez sur la touche « effacer ». Si vous voulez effacer entièrement le numéro, appuyez et maintenez la touche « effacé ».

## Insérez une pause

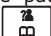Lors de la composition d'un numéro, vous pouvez insérer une pause : appuyez sur la touche de navigation . La lettre P apparaît pour signaler que la pause a bien été enregistrée.


## Visualisez les fiches créées

1. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation **Répertoire**.
2. Appuyez sur la touche  jusqu'à la fiche souhaitée.

## Fonctions avancées


### Menu Principal

#### Pour accéder aux options du menu:

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Faites défiler les options en appuyant sur la touche .
3. Pour sélectionner un menu, appuyez sur **Select**.

Pour retourner en mode veille de n'importe quel menu :

Si vous appuyez sur Retour, vous retournerez à chaque fois à l'étape précédente.

Pour retourner en mode veille de n'importe quel menu, appuyez sur la touche .

### Note:

- En mode veille, appuyez sur la touche pour allumer l'écran LCD .

## Menu Détaillé

### 1. Liste d'appel (voir p.22)

### 2. Répertoire (voir p. 31)

Ajoutez un numéro dans le répertoire(voir p.32)  
Modifiez les fiches du répertoire(voir p. 33)  
Effacez une fiche du répertoire (voir p. 33)  
Delete All (see page 31)  
PB Status (see page 31)

### 3. Réglage BS (voir p.35)

Supprimez le combiné(voir p. 35)  
Mode de numérotation (voir p. 27)  
Temps Flash (voir p. 35)  
Modifiez le code PIN (voir p. 36)  
RAZ Base (voir p. 36)

### 4. Réglage combiné (voir p.37)

Réveil (voir p.37)  
Réglage de l'audio(voir p. 38)  
Réglage sonnerie (voir p. 19)  
Volume (voir p. 18, 38)  
Choix du langage (voir p. 25)  
Attribution d'un nom(voir p. 26)  
Réponse automatique (voir p. 25)  
Paramétrage du contraste de l'écran LCD (voir p. 39)  
Programmez la date et l'heure (voir p. 39)  
Déclarez une nouvelle base (voir p. 40)  
RAZ Combiné (voir p. 40)

### 5. Enregistrement d'un combiné(voir p. 41)

### 6. Répondeur (voir p.45) (disponible uniquement pour l'AMPLIDECT285™)

Annonce (voir p. 45)  
Message (voir p. 48)  
Réglage du répondeur (voir p. 50)

## Répertoire

Le répertoire téléphonique permet la mémorisation des numéros de téléphone de sorte que vous pouvez appeler une personne sans avoir à se souvenir de son numéro ou d'entrer son numéro au clavier, tout en limitant le risque de composer un faux numéro. Vous pouvez enregistrer 50 fiches dans le répertoire

### Table des caractères

Pour entrer un caractère spécifique, appuyez une fois ou plusieurs fois sur la touche correspondant à la lettre choisie..

Touche	Caractères
0	(spc) 0 ? & / . , !
1	1 @ _ + - " ( ) %
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9