



Caution: This telephone product is specifically designed for people with hearing difficulties and is provided with a handset earpiece volume control for individual requirements. Due care must be taken by all users that the handset earpiece volume control is set to the lowest level acceptable by each respective user. Care should therefore be exercised to ensure that any new users are familiar with this requirement.

Attention: Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des problèmes d'audition. Il possède un écouteur à volume variable. À la première utilisation, assurez-vous que le bouton de réglage du volume soit positionné sur la position volume minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter à leur audition.

WARNUNG: Dieses Telefon wurde speziell für schwerhörige Personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der Lautstärkereglер des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIERES	27
INTRODUCTION	29
Contenu du colis	30
DESCRIPTION	31
Description Générale	31
INSTALLATION	33
Raccordement de l'appareil	33
Position murale	33
REGLAGES	34
Réglage du volume de la sonnerie	34
Réglage de la Réception des appels	34
Réglage du Volume et de la Tonalité	35
Réglage de la Numérotation (Décimale/ Fréquence Vocale)	36
UTILISATION DU TÉLÉPHONE	37
Appeler	37
Appeler en mode « Mains libres »	37
Recevoir une Communication	38
Recevoir une Communication en mode « Mains Libres »	38
Rappel du dernier Numéro	38
Touche Rappel d'Enregistreur « R »	38
Utilisation du Casque	38
ACCESSOIRES EN OPTION	39
Vibreur	39
COMPOSITION AUTOMATIQUE D'UN NUMÉRO	40
Mettre un Numéro en Mémoire	40
Composer un Numéro mis en Mémoire	40

CONTENTS

RÉPONDEUR	41
Marche/Arrêt du Répondeur	41
Annonce d'Accueil	41
Enregistrer une annonce d'Accueil	42
Ecouter l'annonce d'Accueil	42
Réglages du Répondeur	43
Ecouter les Messages reçus	44
Effacer un Message Reçu	45
Filtrer les Appels	45
Utiliser le Répondeur à Distance	45
Code d'Utilisation à Distance	45
Contrôle à Distance	46
Commandes de Contrôle à Distance	46
Enregistrer un Mémo	47
Enregistrer un Appel	47
Surveillance d'une Pièce	48
Activation du Répondeur à Distance	48
Manque de Mémoire	48
PROBLEMES DIVERS ET SOLUTIONS	49
POUR VOTRE SÉCURITÉ	50
GARANTIE	51
RECYCLAGE DE L'APPAREIL	52
<i>Accessoires Couleurs Inclus</i>	79
GABARIT DE MONTAGE MURAL	81

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre GEEMARC CL210A. Cet appareil est un téléphone multifonctions qui vous offre une fonction haut-parleur (mode « mains libres »), une fonction mémorisation de numéros et un répondeur.

Il est important que vous lisiez les conseils d'utilisation ci-dessous afin d'utiliser au mieux votre téléphone GEEMARC .Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Ce mode d'emploi explique comment utiliser le téléphone :

CL210A

INTRODUCTION

Contenu du Colis

Une fois le colis déballé, vérifiez que vous disposez de l'ensemble des éléments présentés ci-après. Si l'un des éléments est absent, contactez sans délai votre revendeur.

- 1 Base CL210A
- 1 combiné CL210A et un cordon spiralé
- 1 adaptateur secteur
- 1 cordon téléphonique
- 1 Mode d'Emploi
- 2 Caches couleur



Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique,
consultez notre site Internet:


www.geemarc.com

Téléphone +33 (0)32858 7599

Ou Fax +33 (0)32858 7576


DESCRIPTION

Description Générale

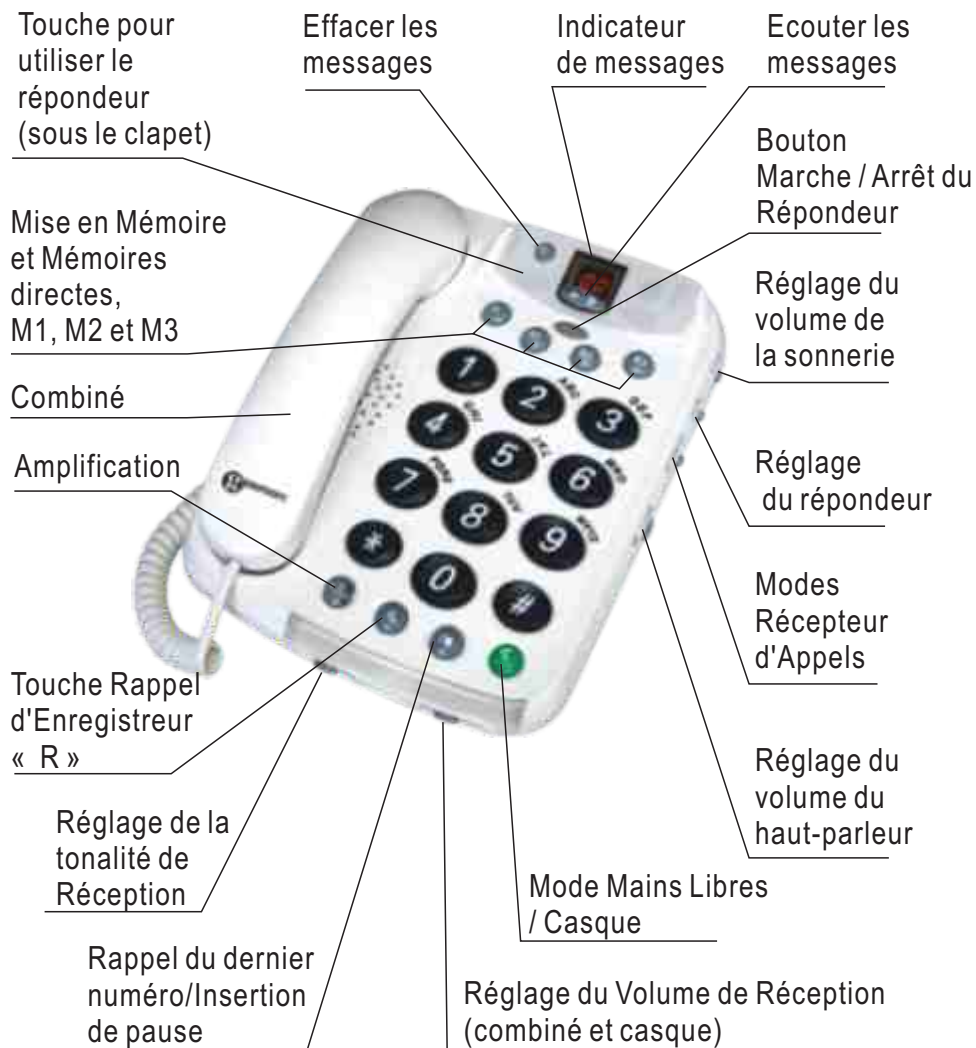


DESCRIPTION

Arrière de l'Appareil

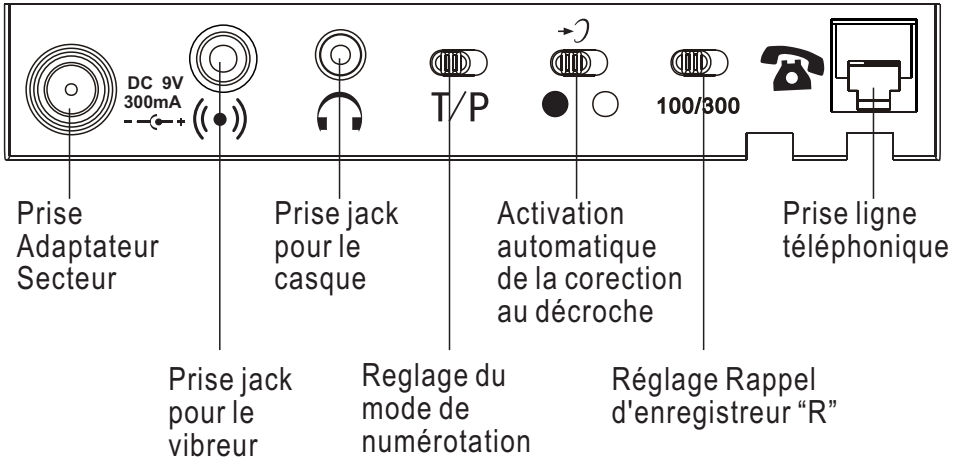


Base

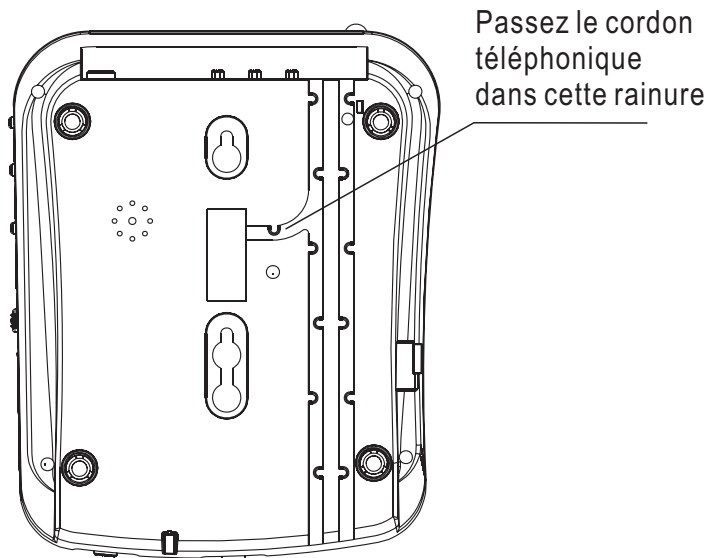

INSTALLATION

Raccordement de l'appareil

Branchez au combiné le cordon à spirale. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à la prise qui se trouve à gauche de la base du CL210A. Placez le combiné sur la Base à l'endroit prévu à cet effet.

Connectez le cordon téléphonique à la prise  située à l'arrière du téléphone et passez le dans la rainure vers l'arrière de la Base. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique murale (**).

Connectez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil puis branchez-le dans une prise secteur 230V.(*). Veuillez choisir une prise électrique située près de votre téléphone de façon à pouvoir le débrancher rapidement en cas de problème.

Montage mural

En Position murale, vous pouvez accrocher le combiné sur le téléphone sans pour autant le raccrocher. Vous trouverez un petit ergot prévu à cet effet sur la partie supérieure de la zone d'appui du combiné.

1. Fixez au mur 2 vis d'ancrage. Celles-ci doivent se trouver l'une au dessus de l'autre à une distance de 83 mm et doivent dépasser du mur de 5mm afin de maintenir correctement la base du téléphone.

2. Branchez le cordon téléphonique dans la prise à l'arrière de la base de l'appareil. Passez le dans la rainure et branchez le dans la prise téléphonique murale (**).

3. Accrochez la base du téléphone aux vis et poussez-la vers le bas afin de l'ancrer correctement en position.

4. Connectez une extrémité du cordon à spirale au combiné. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à spirale à la prise qui se trouve à gauche de la base du CL210A

5. Faites tourner l'ergot de la base de 180 degrés de façon à ce que le combiné puisse s'y accrocher.

(*) Classé comme « Tension dangereuse » conformément au standard EN60950

(**) Classé TNV-3 conformément au standard EN60950.

REGLAGES




Réglage du volume de la sonnerie

Un bouton de réglage situé sur le côté droit du CL210A permet de choisir parmi trois volumes de sonnerie: HI (**Haut**), LOW (**Bas**) ou OFF (**Arrêt**).




Réglage du Signal de Réception d'Appels



Un commutateur à trois positions situé sur le côté droit du CL210A permet de choisir parmi trois types de signal d'appel.

-  La sonnerie est activée
-  La sonnerie et le vibreur sont activés (vibreux à connecter – non fourni)
-  La sonnerie et le voyant sont activés


Réglage du Volume et de la Tonalité

Vous pouvez modifier le volume et la tonalité de réception dans le combiné durant une conversation téléphonique en fonction de vos besoins auditifs.

Utilisez le bouton de contrôle sur le bord avant du téléphone pour ajuster les niveaux de réception du combiné  .

Le bouton  situé sur la base du téléphone vous offre une possibilité d'amplification supplémentaire (jusqu'à 40dB). Lorsque la fonction amplification est en marche, le voyant rouge du bouton  est allumé.

Régler l'Amplification par défaut

Un commutateur d'amplification Marche / Arrêt  ● ○, situé à l'arrière de l'appareil permet d'activer ou de désactiver l'amplification lors du décroché du combiné.

Commutateur ● ○ en position ● (Marche)

L'amplification supplémentaire et les contrôles de Volume et Tonalité sont automatiquement activés pour chaque utilisation de l'appareil. Le voyant LED situé sur le bouton Amplification est allumé.

En communication, appuyez sur le bouton Amplification pour désactiver l'amplification et le contrôle de Tonalité. Vous pouvez cependant ajuster le niveau de réception du combiné grâce au réglage du volume.

Après un raccroché le téléphone sera reinitialisé lors d'un prochain appel en mode Amplification.

REGLAGES

Commutateur ●○ en position ○ (Arrêt)

L'amplification et le contrôle de Tonalité sont éteints à chaque fois que vous utilisez le téléphone. Le voyant situé sur le bouton Amplification n'est pas allumé.

Appuyez sur le bouton Amplification pendant une communication afin d'activer l'amplification supplémentaire et les contrôles de Volume et Tonalité. Le voyant situé sur le bouton Amplification s'allumera pour signaler ce changement de mode. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, l'amplification supplémentaire et les contrôles de Tonalité seront de nouveau éteints. Le voyant LED s'éteindra également afin de signaler ce changement de mode.

Après un raccroché le téléphone sera reinitialisé lors d'un prochain appel en mode sans amplification.

Ajuster la Tonalité d'Ecoute

Si le volume du combiné a été amplifié, le contrôle de la Tonalité peut aussi être ajustée. Vous pouvez ajuster et diminuer les hautes et les basses fréquences à l'aide du bouton situé sur le bord avant de l'unité.



Note: La fonction d'ajustement de la tonalité ne sera pas effective lorsque le volume du combiné sera réglé au niveau normal.

Réglage de la Numérotation (Décimale/ Fréquence vocale)

Le Commutateur Décimale / Fréquence vocale (**P/T**) est pré-réglé en usine sur la position Fréquence vocale (**T**). En France, tous les réseaux téléphoniques utilisent maintenant les appels en Fréquence Décimale . Si votre téléphone ne parvient pas à appeler, il est peut être utilisé avec un autocommutateur privé (**PBX**) de type plus ancien. Dans ce cas, le Commutateur Décimale / Fréquence vocale situé à l'arrière de l'appareil doit être mis en position Décimale (**P**).

UTILISATION DU TÉLÉPHONE


Appeler

Décrochez le combiné.

Composez le numéro de votre correspondant lorsque vous entendez la tonalité.


Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base

Appeler en Mode « Mains Libres »


Appuyez sur . Le mode « mains libres » est activé.

Composez le numéro de votre correspondant. Ajustez le volume en utilisant le bouton de contrôle **VOL** situé sur le côté droit de la base.

Lorsque votre correspondant décroche, vous pouvez parler avec le téléphone en mode « mains libres » (le combiné étant posé sur la base) Parlez vers le micro situé sur le bord avant du téléphone.

Appuyez sur  pour terminer la communication.

Note: Il vous suffit de décrocher le combiné pour désactiver le mode « mains libres » pendant une communication.

Pour activer le mode « mains libres » en cours de communication, appuyez sur le bouton  en raccrochant.

Une seule personne peut parler à la fois lorsque le téléphone fonctionne en mode « mains libres ». La Commutation entre le haut-parleur et le micro est automatique. Cela dépend du niveau de son entre le signal reçu et le micro. Il est, par conséquent essentiel qu'il n'y ait pas de bruits forts, par ex. de la musique à proximité du téléphone, car cela empêcherait le mode « mains libres » de fonctionner correctement.


UTILISATION DU TÉLÉPHONE


Recevoir une Communication

Décrochez le combiné et parlez


Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Recevoir une Communication en Mode « Mains Libres »

Appuyez sur le bouton  pour parler en mode « mains libres ».

Appuyez sur  pour terminer la communication.

Rappel du dernier Numéro

Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton  afin de refaire le dernier numéro appelé (jusqu'à 32 chiffres).

Touche Rappel d'Enregistreur « R »

Si le téléphone est connecté au Réseau public ou à un autocommutateur privé, des Services tels que le transfert d'appel, le rappel automatiquepeuvent être utilisées grâce à la touche « R ».

Veillez vous référer au mode d'emploi de votre opérateur pour l'utilisation de ces Services

Note: Vous pouvez sélectionner le temps de coupure à 100/300ms en utilisant le commutateur « Rappel d'enregistreur » situé à l'arrière du téléphone.


Utilisation du Casque

On peut brancher un casque à la prise jack 2,5mm située à l'arrière du téléphone.

Appuyez sur le bouton  pour obtenir la tonalité.

Note: La réception n'est pas amplifiée lorsque vous utilisez un casque.

Vibreur

Le téléphone est muni d'une prise jack 3,5mm à l'arrière de l'appareil marquée  . Vous pouvez connecter un coussinet vibrant optionnel à cette prise : Lorsque vous recevez un appel, ce dernier se mettra alors à vibrer.


COMPOSITION AUTOMATIQUE D'UN NUMÉRO

Ce téléphone est muni de trois mémoires directes.


Si un numéro a été mémorisé pour une des touches, il suffit d'appuyer sur la touche en question pour appeler le numéro.

Mettre un Numéro en Mémoire

Décrochez le combiné


Appuyez sur  .

Composez le numéro à mémoriser (16 chiffres maximum)

Appuyez de nouveau sur  .

Choisir la touche mémoire directe correspondant au numéro à mémoriser (**M1**, **M2** ou **M3**) en appuyant dessus.

Raccrochez.

Note: Appuyez sur  si vous souhaitez insérer une pause dans le numéro de téléphone

Composer un Numéro mis en Mémoire


Décrochez le combiné et attendre la tonalité

Appuyez sur la touche de numérotation automatique correspondante (**M1**, **M2** ou **M3**)

Le numéro mémorisé sera composé automatiquement

RÉPONDEUR

Marche/Arrêt du Répondeur

Le répondeur peut être allumé ou éteint en appuyant sur le bouton . Lorsqu'il est allumé, les appels reçus seront pris par le répondeur après un certain nombre de sonneries (voir Réglage du Répondeur). Lorsque le répondeur prend les appels, votre correspondant entend votre annonce d'accueil, et après le Bip sonore, le correspondant peut alors laisser un message n'excédant pas 2 minutes. Si votre correspondant laisse un message de plus de 2 minutes, son appel sera déconnecté après les 2 minutes. Si votre correspondant cesse de parler pendant plus de 7 secondes lors de l'enregistrement de son message, le répondeur se déconnectera automatiquement.

La mémoire du téléphone stocke environ 14 minutes de messages reçus (y compris l'annonce d'accueil).

Note: SI LE REPONDEUR EST ETEINT, DEUX BARRES SERONT AFFICHEES, ET AUCUN APPEL NE SERA ENREGISTRE.

Par ailleurs, si le répondeur est éteint, il se mettra en Marche après 10 sonneries. Cela permet de maintenir l'accès à distance de certaines fonctionnalités après l'entrée du code secret

Votre répondeur CL210A peut être accessible à distance à partir:

- ▣ ● de votre téléphone portable
- ▣ ● de tout téléphone externe (avec numérotation Fréquence Vocale)

Annonce d'accueil

Avant d'activer le répondeur, Il est impératif d'enregistrer une annonce d'accueil. Cette annonce s'adresse à vos correspondants et peut durer 1 minute.

Vous pouvez par exemple donner votre nom et les inviter à laisser un message après le Bip sonore.

Note: Si aucune annonce d'accueil n'a été enregistrée, l'afficheur clignotera.

RÉPONDEUR

Enregistrer l' Annonce d'Accueil

Appuyez sur ◀◀/Ann et maintenez la touche appuyée. Vous entendrez un Bip sonore et l'affichage montrera **rA**


Enregistrez votre annonce d'accueil. Parlez clairement à environ 15-20 cm de l'appareil (votre annonce doit durer entre 5 et 60 secondes)

Relâchez la touche ◀◀/Ann pour arrêter l'enregistrement

L'annonce d'accueil sera répétée après quelques secondes. Répétez cette procédure si vous souhaitez changer votre annonce, au quel cas l'ancienne annonce sera automatiquement effacée après le nouvel enregistrement.

Ecouter l'Annonce d'Accueil

Appuyez brièvement sur ◀◀/Ann , L'annonce d'accueil en mémoire vous sera alors relu.

Pour arrêter la relecture de l'annonce d'accueil en mémoire, appuyez sur le bouton  de votre répondeur.

Réglages du Répondeur

Utilisez le bouton **2/6/TS** situé sur le côté droit du téléphone pour choisir le nombre de sonneries qui activera le répondeur.

- **2** = les appels sont pris après deux sonneries
- **6** = les appels sont pris après six sonneries
- **TS** (TOLL SAVER) = active la fonction économie d'appels

En mode économie d'appels, le répondeur prend les appels après 6 sonneries tant que le premier nouveau message ait été enregistré. Une fois qu'un message est enregistré, le répondeur prendra alors les appels après environ deux sonneries. Ce mode est utile lorsque vous voulez d'accéder à votre répondeur à distance. En effet, si le répondeur n'a pas pris votre appel après la quatrième sonnerie, vous savez que vous n'avez pas de nouveaux messages et pouvez raccrocher avant que la communication ne vous soit facturée. Si par contre le répondeur prend votre appel après deux sonneries, cela signifie que vous avez des nouveaux messages.

RÉPONDEUR

Ecouter les Messages reçus

L'affichage clignote et indique combien de nouveaux messages vous avez reçus. Si vous n'avez reçu aucun nouveau message, l'affichage fixe montre alors le nombre total de messages (anciens).

Appuyez sur ►/|| / pour commencer à écouter vos messages.

Si vous souhaitez faire une pause pendant l'écoute de vos messages, appuyez sur ►/|| et la lecture du message s'arrêtera (max. 7 secondes).

Appuyez de nouveau sur ►/|| / pour continuer à écouter vos messages.

L'écoute de vos messages commencera toujours par les nouveaux messages. Par exemple, si vous avez six anciens messages et deux nouveaux, seuls les deux nouveaux vous seront lus avant que le répondeur ne se remette en veille.

Appuyez de nouveau sur le bouton ►/|| pour écouter tous vos messages, en commençant par les plus anciens.

Lorsque vous avez fini d'écouter vos messages, vous entendrez deux Bip sonores, puis la machine se mettra en veille. Tous les messages reçus sont enregistrés (à moins que vous ne les ayez effacés lors de l'écoute, voir plus bas). Les nouveaux messages seront enregistrés après les anciens.

Autres fonctions disponibles pendant l'Ecoute des messages

▶▶	Pour passer directement au message suivant
◀◀	Pour répéter le message en cours, ou pour retourner aux messages précédents en gardant la touche appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un Bip sonore
⏻(Marche/Arrêt)	Pour arrêter l'écoute
C	Pour effacer les messages

RÉPONDEUR

Ecoute des messages par le combiné (volume +40dB)

Pour écouter vos messages en utilisant le combiné, décrochez-le et appuyez sur ►/III. Appuyez sur ↻ pour amplifier le volume d'écoute des messages jusqu'à 40dB.

Effacer un Message Reçu

Si vous souhaitez effacer un message unique, appuyez sur **C** pendant l'écoute du message.

Pour effacer tous les messages, appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à ce que vous entendiez un Bip sonore.

Veuillez noter que les nouveaux messages ne peuvent pas être effacés avant d'avoir été écoutés.

Filtrer les Appels

Lors d'un appel, après l'annonce, le message en cours d'enregistrement peut être écouté grâce au haut-parleur. Vous pouvez ajuster le volume en utilisant le bouton situé à droite sur votre téléphone.

Si vous souhaitez prendre l'appel, il vous suffit de décrocher le combiné. Si l'enregistrement du message ne s'arrête pas automatiquement, appuyez sur la touche ⏻ du répondeur ou appuyez (pendant deux secondes) sur la touche * du téléphone.

Utiliser le Répondeur à Distance

Ce répondeur peut être interrogé à distance en utilisant un téléphone en numérotation Fréquence vocale (T). Appelez le répondeur (en composant votre numéro de téléphone) et entrez votre code d'accès à distance pendant que vous entendez l'annonce d'accueil. Une fois que votre code d'accès a été accepté, plusieurs commandes à distance vous sont offertes.

Code d'Utilisation à Distance

Un code confidentiel à trois chiffres est requis pour activer/désactiver le répondeur ou pour écouter les messages à partir de l'extérieur. Le code d'accès est imprimé sous la base du téléphone.

RÉPONDEUR

Contrôle à Distance

Appelez le répondeur (en composant votre numéro de téléphone)

Composez votre code d'accès alors que vous entendez l'annonce d'accueil. Vous entendrez deux Bip sonores si votre code est accepté

Choisissez une commande à distance (dans les 20 secondes) parmi la liste ci-dessous

Lorsque vous avez fini d'utiliser le répondeur il vous suffit de raccrocher.

Commandes de Contrôle à Distance

Fonctions commandes

25 Ecouter les nouveaux messages

2# Ecouter tous les messages

Pendant l'Ecoute des Messages

3# Effacer un message unique pendant son écoute

6# Passer directement au message précédent

7# Passer directement au message suivant

8# Répéter le message

Arrêter l'écoute

Après l'Ecoute des Messages

3# Effacer tous les messages

7# Enregistrer une nouvelle annonce d'accueil pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez de nouveau sur 7#.

8# Enregistrer un MEMO ; pour stopper l'enregistrement, appuyez de nouveau sur 8#

9# Pour allumer ou éteindre le répondeur. Trois Bip sonores indiquent que le répondeur est éteint deux Bip sonores indiquent qu'il est allumé.

0# Surveillance de pièce ; appuyez sur 5# pour arrêter la surveillance de la pièce.

RÉPONDEUR

Note : Lors de l'écoute à distance, il est nécessaire d'appuyer sur une touche quelconque de votre téléphone au moins toutes les 2 mn 30 (après émission d'un Bip) pour continuer l'écoute des messages.

Enregistrer un Mémo

Vous pouvez laisser un message MEMO pour les autres utilisateurs du répondeur.

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche **OO**.

Le message **rE** s'affichera

Commencez à enregistrer votre mémo après le Bip sonore.

Il vous suffit de relâcher la touche **OO** pour arrêter l'enregistrement

Le message MEMO peut être écouté en appuyant sur la touche **►/||** du répondeur ou par la fonction d'accès à distance en utilisant un téléphone distant.

Enregistrer un Appel

Vous avez la possibilité d'enregistrer une conversation téléphonique complète. Appuyez sur la touche **OO** avant de commencer à enregistrer cette conversation si une autre fonction de la machine est en cours d'exécution.

Décrochez le combiné pour prendre l'appel

Appuyez une seule fois sur la touche **OO** pendant l'appel

Le message **2r** s'affichera. Le répondeur enregistrera alors la conversation téléphonique

Appuyez sur la touche **OO** pour cesser l'enregistrement

Appuyez sur la touche **►/||** pour écouter la conversation enregistrée.

RÉPONDEUR

Surveillance d'une Pièce

Cette fonction d'accès à distance vous permet d'appeler votre résidence et d'activer la fonction micro de votre répondeur. Cela signifie que vous pouvez surveiller les bruits dans la pièce où se trouve le répondeur pendant une durée allant jusqu'à 30 secondes.

Activation du Répondeur à Distance

Si vous oubliez de mettre en Marche votre répondeur en sortant, vous pouvez le faire à distance grâce à un autre téléphone.

Composez votre numéro sur un téléphone extérieur et laissez-le sonner. Après environ 10 sonneries, le répondeur prendra votre appel et émettra un long Bip sonore.

Entrez alors le code d'accès imprimé sous la base de votre téléphone. Vous entendrez deux courts Bip sonores si votre code est accepté

Appuyez sur 9#. Vous entendrez deux courts Bip sonores. Ceci confirme que votre répondeur est allumé.

Raccrochez le téléphone.

Manque de Mémoire

La capacité totale de la mémoire de votre répondeur est d'environ 14 minutes. Cet espace mémoire est partagé entre votre annonce d'accueil, les mémos personnels et les messages reçus. Lorsque la mémoire est pleine, l'affichage vous montrera FL. Le répondeur prendra alors les appels après 10 sonneries pour permettre l'écoute et l'effaçage des messages à distance. Aucun nouveau message ne sera pris tant que les anciens messages n'auront pas été écoutés et effacés.

PROBLEMES DIVERS ET SOLUTIONS

Pas d'affichage

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur soit branché correctement et qu'il ne soit pas détérioré.

Le CL210A ne sonne pas

- Vérifiez que le volume de la sonnerie ne soit pas arrêté.
- Assurez-vous que le cordon ligne du téléphone soit correctement branché et qu'il ne soit pas détérioré.
- Branchez un autre téléphone sur la prise téléphonique PTT ou branchez votre téléphone sur une autre prise téléphonique afin de voir si le problème provient de votre appareil ou de la prise PTT.
- Il se peut que trop de dispositifs de communication soient branchés sur une seule ligne, par ex. un autre téléphone, un modem ou un fax. Contactez votre fournisseur de réseau pour vous aider à calculer la limite de votre ligne téléphonique personnelle ou professionnelle.

Pas de tonalité

- Assurez-vous que le cordon ligne du téléphone soit correctement branché et qu'il ne soit pas détérioré.
- Branchez un autre téléphone sur la prise téléphonique PTT ou branchez votre téléphone sur une autre prise téléphonique afin de voir si le problème provient de votre appareil ou de la prise PTT.

Pas de réponse sur l'affichage LCD

- Vérifiez qu'il n'y a pas de coupure d'électricité dans votre voisinage.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Généralités

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

N'ouvrez pas le téléphone. Contactez l'assistance technique pour toute réparation nécessaire.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de détergent ou de produit lustrant – ils pourraient en effet endommager l'appareil et les composants électriques qu'il contient.

Consignes de sécurité

N'exposez pas directement le CL210A aux rayons du soleil.

Ne pas utiliser le téléphone dans des endroits humides

N'exposez pas le téléphone au feu ou à d'autres conditions dangereuses.

Débranchez votre téléphone pendant les orages car ces derniers pourraient l'endommager. Votre garantie n'inclut pas les dommages causés par les orages.

Ce téléphone est conçu pour fonctionner à des températures entre 5°C et 45°C.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques ; la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie.

En cas de problème, rapprochez vous de votre point de vente, sinon, contacter notre assistance technique au 03 28 58 75 99 ou visitez notre site Internet www.geemarc.com

IMPORTANT: VOTRE TICKET DE CAISSE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVE ET PRESENTE EN CAS DE RECLAMATION.

**Cette garantie n'est valide
qu'en France**

DECLARATION: Geemarc Telecom SA déclare que ce téléphone respecte les exigences de la Directive 1999/5/EEC concernant les Equipements radio et télécommunication et en particulier les articles 3.1a, 3.1b et 3.2

Le fonctionnement du téléphone n'est pas garanti si la ligne téléphonique fournit un courant inférieur à 18mA.



Raccordement électrique: Cet appareil est conçu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension Classée comme dangereux selon la norme EN60950).

Par précaution et en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230v. Il doit être installé à proximité de l'appareil et être aisément accessible .

Raccordement téléphonique : Les tensions présentes sur les réseaux de télécommunication sont classées TRT-3 (Tension du réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

DIRECTIVES SUR LE RECYCLAGE

La Directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsqu'un produit ne sert plus, ne pas le jeter à la poubelle.

Veillez choisir une des options suivantes pour vous en débarrasser:

- Déposez votre appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou bien redonner votre ancien appareil à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, le magasin se doit d'accepter de reprendre l'ancien.

Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.











Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique,
consultez notre site Internet:


www.geemarc.com

Téléphone +33 (0)32858 7599

Ou Fax +33 (0)32858 7576

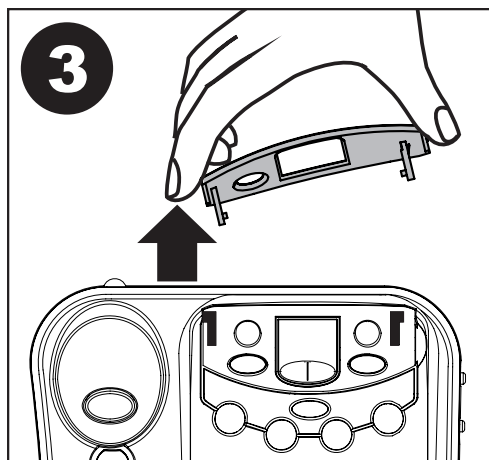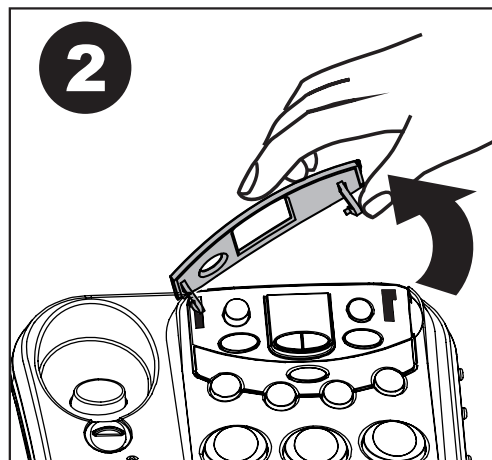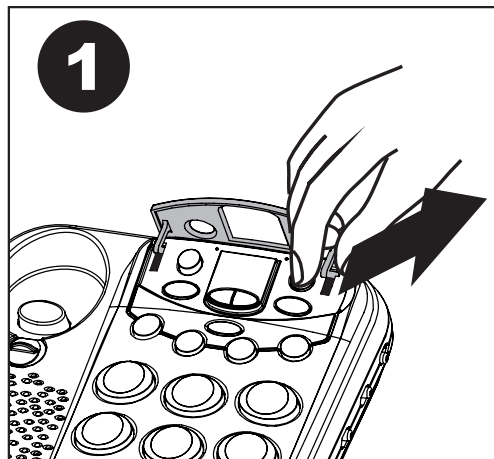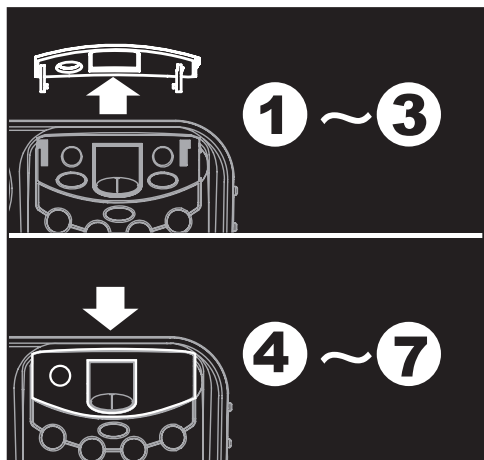

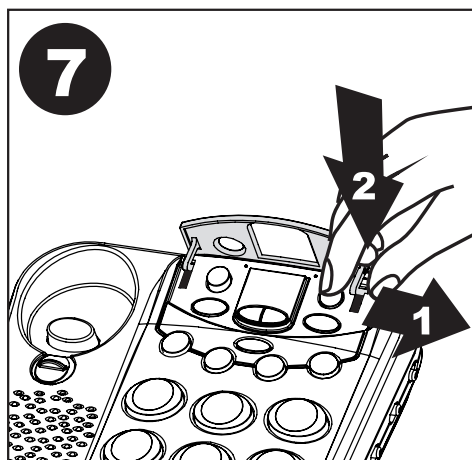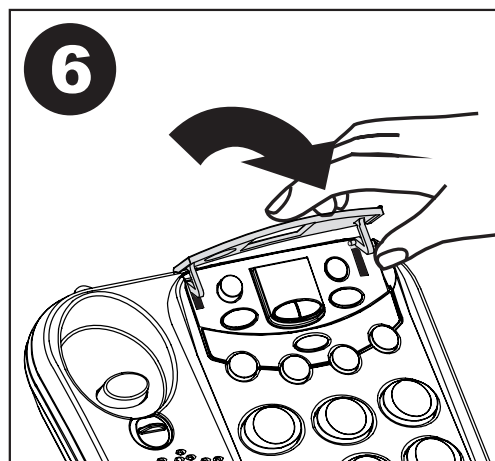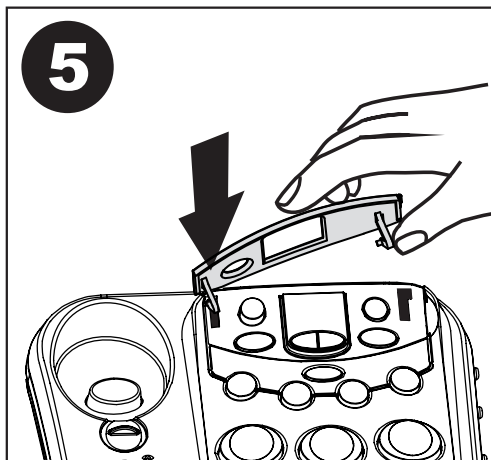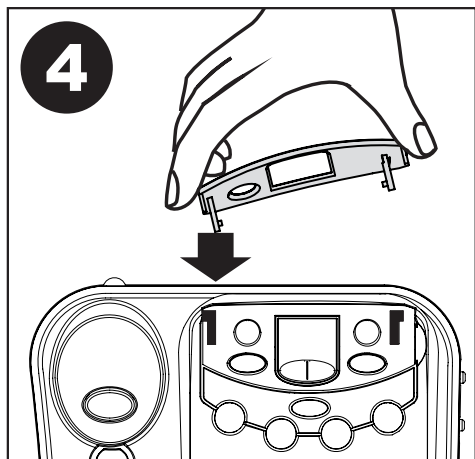

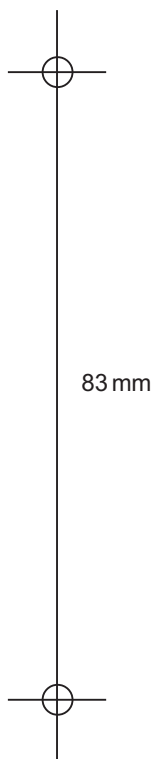



UGCL210A_EnFrGe_Ver.1.0

geemarc UK

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc FRANCE

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc GERMANY

Walter-Kolb-Str.9-11
60594 Frankfurt-am-Main
Deutschland
T: 069-9621 7635
F: 069-9621 7620

www.geemarc.com