

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

DALLAS 100 VM

TÉLÉPHONE AMPLIFIÉ AVEC
INDICATEUR NIVEAU D'EMISSION




geemarc™
Telecom SA

Français


DESCRIPTION

DESCRIPTION GÉNÉRALE

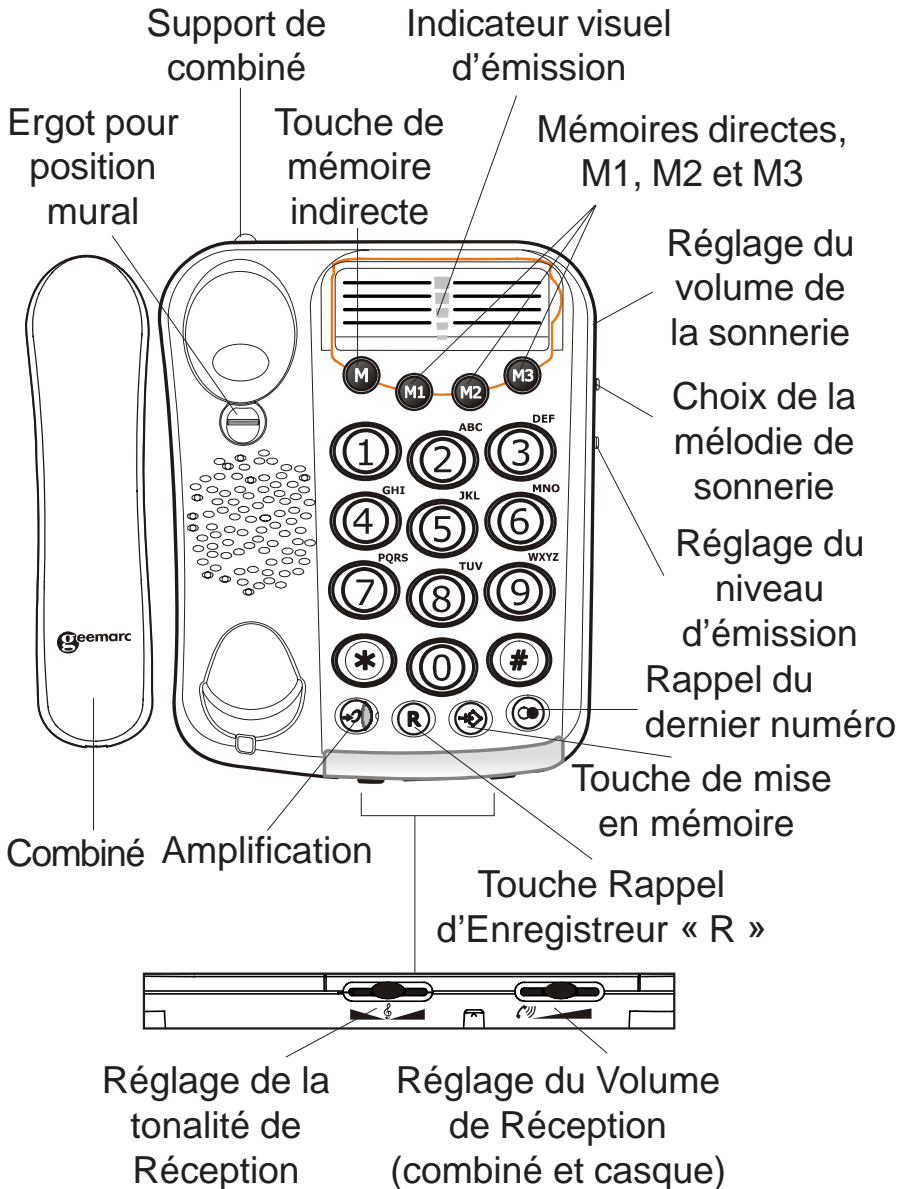


DESCRIPTION

ARRIÈRE DE L'APPAREIL

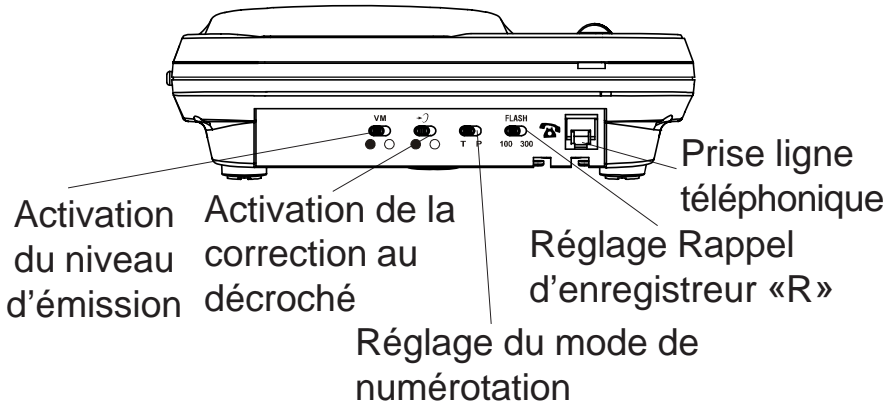

BASE


Passez le cordon téléphonique dans cette rainure

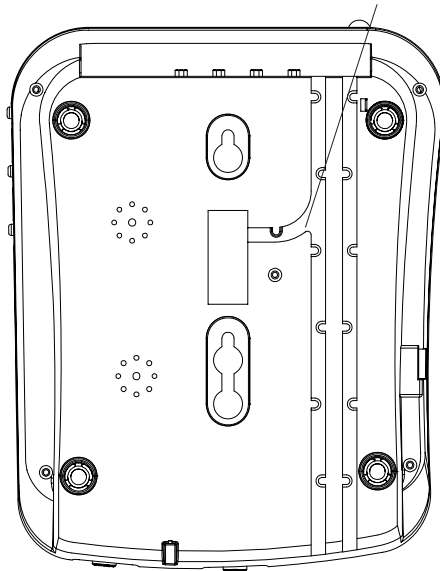

INSTALLATION

1 - RACCORDEMENTS

- 1 - Branchez le cordon du combiné.
- 2 - Branchez le cordon de ligne à l'arrière de votre téléphone puis dans la prise téléphonique murale*.

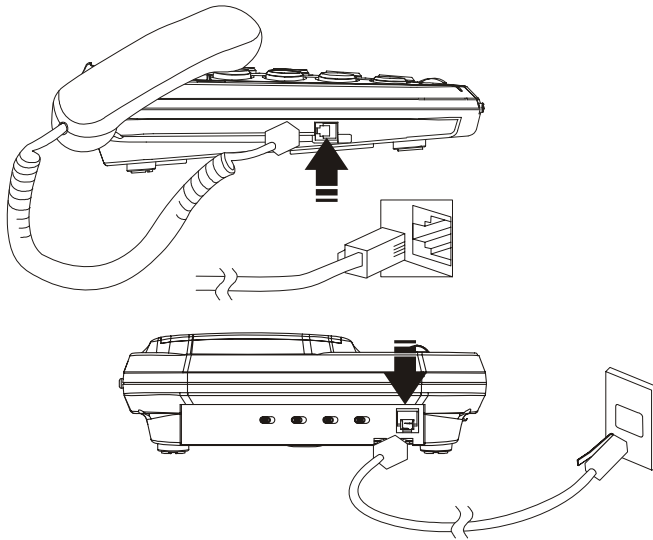

(*) Classé TRT-3 selon la norme EN60950.

2 - REGLAGE DU NIVEAU DE SONNERIE

Le bouton de réglage situé sur le côté droit permet de régler à un niveau Fort, Faible ou Arrêt le niveau de sonnerie.



INSTALLATION


3 - CHOIX DE LA MÉLODIE DE SONNERIE

Le bouton de sélection situé sur le coté droit permet de choisir la mélodie de sonnerie.



4 - POSITION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, tournez l'ergot situé sur la base (en dessous de l'écouteur du combiné). Percez 2 trous verticaux distant de 85 mm dans votre mur pour y insérer 2 chevilles avec leurs vis. Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Placez votre téléphone sur les têtes de vis et faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.

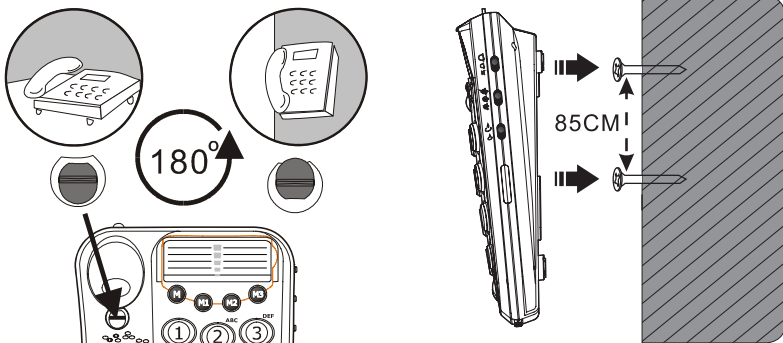

INSTALLATION

5 - FREQUENCE VOCALE OU DECIMALE (T/P)**

Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode fréquence vocale (**T**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode fréquence décimale (**P**), vos appels n'aboutiront pas, il vous suffira alors de commuter l'interrupteur **T/P** situé en dessous du téléphone sur la position **P** pour remédier à ce problème.



T P

** Ne pas modifier les positions des boutons après réglages.

UTILISATION


1 - RECEVOIR UN APPEL


- Lorsque le téléphone sonne (le voyant lumineux de sonnerie de votre téléphone est activé), décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.

- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2 - REGLAGE DU VOLUME DE RECEPTION

Vous pouvez augmenter le volume de votre combiné.

Utilisez le bouton , situé sur le devant de la base, pour ajuster le volume à votre oreille.

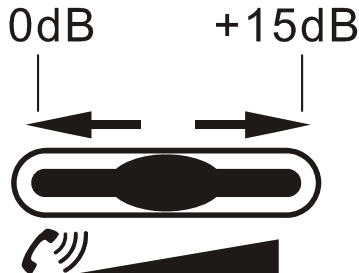

UTILISATION

3 - AJUSTER LA TONALITÉ D'ECOUTE

Vous pouvez diminuer ou augmenter les hautes fréquences à l'aide du bouton situé sur le devant de la base.






4 - APPELER

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.


UTILISATION

5 - REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Si votre correspondant vous entend faiblement, vous pouvez augmenter le volume d'émission à l'aide du commutateur   situé sur le côté droit de la base.

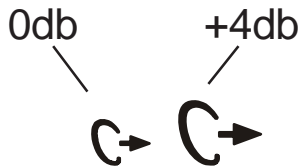

6 - RAPPEL DU DERNIER COMPOSE

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche , le dernier numéro se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les numéros en mémoire).



7 - TOUCHES R,* &


Touches d'accès aux Services de France Télécom (Signal d'Appel, Conversation à Trois).

UTILISATION

8 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 3 mémoires directes et 10 indirectes (16 chiffres maximum par mémoire).

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2** ou **M3**.
Ou appuyez sur la touche **MEM** puis sur un chiffre de **0** à **9** pour enregistrer un numéro en mémoire indirecte.
- Raccrochez le combiné.

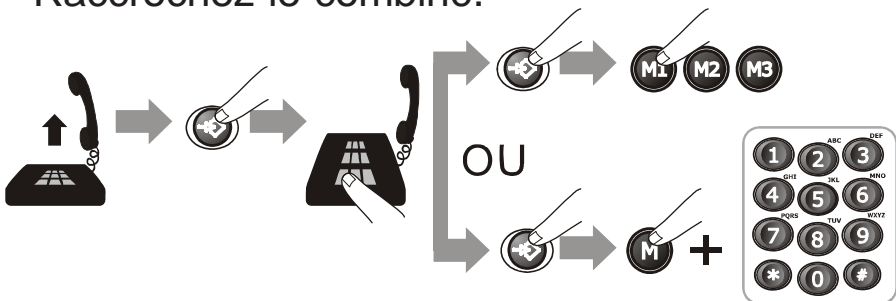

Note: les numéros en mémoire seront perdus après 5 heures de déconnexion du cordon téléphonique de la prise téléphonique.

Un nouveau numéro en mémoire, effacera automatiquement l'ancien numéro.

UTILISATION

9 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.

- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2** ou **M3**, le numéro en mémoire directe se recompose automatiquement.

Ou, appuyez sur la touche **MEM** suivi du chiffre de la mémoire (**0** à **9**), le numéro en mémoire indirecte se recompose automatiquement.

Note: vous pouvez utiliser le répertoire situé sur la base pour repérer vos numéros enregistrés.

10 - FONCTION INDICATEUR DU NIVEAU D'ÉMISSION

Cette fonction vous permet de voir le niveau d'émission envoyé sur la ligne.

Commutateur sur Marche ●


En position décroché, l'indicateur visuel est actif.

Commutateur sur Arrêt ○

En position décroché, l'indicateur visuel est arrêté.


UTILISATION

11 - ACTIVATION AUTOMATIQUE DE L'AMPLIFICATION.

a) Mettre le bouton  sur Marche ● situé à l'arrière de la base, l'amplification est activé à chaque décroché.

b) Mettre le bouton  sur Arrêt ○, l'amplification n'est pas activé au décroché

12 - REGLAGE DU VOLUME DE RECEPTION

En mode décroché, appuyez sur le bouton  en bas à gauche du clavier pour activer ou désactiver l'amplification.

Amplification activé : Quand l'amplification est activée, le voyant du bouton est activé, une amplification de +15dB est appliquée au niveau de réception.

Amplification désactivé : Quand l'amplification est désactivée, le voyant du bouton est éteint, il n'y a pas d'amplification supplémentaire pour la réception.

UTILISATION

13 - REGLAGE DU TEMPS DE COUPURE

Mettre le bouton Flash situé à l'arrière de la base sur 100ms pour l'Angleterre, les pays internationaux et sur 300 ms pour la France.

FLASH



100 300

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre, liquide ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie.

En cas de problème, rapprochez vous de votre point de vente, sinon, contacter notre assistance technique au 03 28 58 75 99 ou visitez notre site Internet www.geemarc.com.

IMPORTANT: VOTRE TICKET DE CAISSE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVE ET PRESENTE EN CAS DE RECLAMATION.

**Cette garantie n'est valide
qu'en France**

DECLARATION: Geemarc Telecom SA déclare que ce téléphone respecte les exigences de la Directive 1999/5/EEC concernant les Equipements radio et télécommunication et en particulier les articles 3.1a, 3.1b et 3.2. Le fonctionnement du téléphone n'est pas garanti si la ligne téléphonique fournit un courant inférieur à 18mA.



La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.geemarc.com

GARANTIE

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur 230V 50Hz fourni. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme N60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

RECYCLAGE DE L'APPAREIL

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jeter pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrite ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique, consultez notre site Internet:

www.geemarc.com

Téléphone **+33 (0)3 28 58 75 75**

Service après vente **+33 (0)3 28 58 75 99**

Ou Fax **+33 (0)3 28 58 75 76**



UGDALLAS 100 VM_FR_V.1.0

geemarc UK

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc del'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
TEL. SERVICE APRES VENTE:
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Germany

Walter Kolb Str. 9-11
60594 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel: 069 / 96 217 635
Fax: 069 / 96 217 620

www.geemarc.com